



MimmaMà®



Presentazione MimmaMà

MimmaMà® è una poltroncina studiata per facilitare l'allattamento al seno.

E' l'unica poltrona che permette alla mamma di assumere tutte e tre le posizioni di allattamento, soprattutto quella sottobraccio detta anche "a tandem" in caso di allattamento contemporaneo di gemelli, conferendo un comfort che letti e sedie non sono in grado di assicurare. E' un eccellente design italiano che associa prestazioni ergonomiche ad una forma singolare, un'immagine poetica di una figura femminile che abbraccia e protegge la neo mamma ed il suo bambino. Ergonomica, morbida e comoda, è modellata con particolare attenzione anche nella parte di seduta, per sostenere la struttura ossea e non esercitare pressioni sulla parte perineale, riducendo di conseguenza i dolori del dopo parto causati da ferite chirurgiche o complicanze. MimmaMà® offre un ottimale supporto lombare, delle spalle e delle braccia. L'ampiezza dei suoi braccioli e la loro continuità arrotondata consentono di trovare il miglior appoggio sia per la mamma che per il suo bambino. Un morbido appoggiapiedi estraibile consente alla mamma di conservare la corretta posizione della propria schiena, di rilassarsi e di facilitare il sostegno del bambino durante l'allattamento. MimmaMà® nella nuova versione 2010 è realizzabile in diversi colori e tessuti.

Misure: cm. 75x68x90 h

Smontata e imballata: cm. 76x70x76 h



Sfiancature per facilitare
posizione a tandem



Ampi braccioli

Supporto lombare e
delle spalle



Modellazione:
nessuna pressione
sulla parte perineale

Appoggiapiedi estraibile
per mantenere la postura



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE

Via San Giovanni 38/B 29100 Piacenza
Cod. Fisc. 02958860989 Num. REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA

Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F. +39 0523 071924

E. leura@leura.it
www.leura.it

Dati Tecnici-Manutenzione

Poltrona per allattamento realizzata in poliuretano espanso e rivestita in finta pelle PVC espanso in foglia con supporto di tessuto.
La seduta ha una particolare modellazione per offrire un corretto sostegno alla neo mamma, eliminando pressioni e dolori della parte perineale.

365900-N: La base è in alluminio verniciato e dotata di poggiatesta a scomparsa.
Due piccole ruote posteriori fissate al basamento facilitano lo spostamento della poltrona reclinata.

365900-L: La base è a disco in acciaio inox cromato lucido.

365900-S: Base con quattro gambe ad arco in alluminio il progetto riprende il disegno rotondo del sedile e delle braccia.

365900-R: Base in barra lineare in stile sala d'aspetto (L 300 cm. - 3 sedute).

365900-A: Base in barra curva in stile sala d'aspetto (L 410 cm. - 4 sedute).

Categoria: Poliuretano e PVC

Ignifugazione: Classe 1IM secondo Direttiva 93/42/CEE

Classe di lavoro sicuro: 130 Kg

Altezza della seduta: 42 cm

Peso della poltrona: 28.5 Kg

Dimensioni totali (LxPxH): 74x68x90 cm

Smontata imballata (LxPxH): 75x70x66 cm

Istruzioni per la pulizia: Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.



365900-N



365900-L



365900-S1



365900-S2



365900-A

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
Via San Giovanni 38/B 29100 Piacenza
Cod. Fisc. 02958860989 Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F.+39 0523 071924

E. leura@leura.it
www.leura.it



MimmaMà®

CE

Articolo Conforme alla
Direttiva 93/42/CEE Item 1a
Conformity With
Directive 93/42/CEE

Cartella Colori



Arancio 41 L.



Bianco 1200 L.



Verde 1816 L.



Viola 5947 L.

La poltrona MimmaMà può essere realizzata anche in altri colori per un minimo di dieci pezzi.

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE

Via San Giovanni 38/B 29100 Piacenza
Cod. Fisc. 02958860989 Num. REA PC-0169053



SEDE OPERATIVA

Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F. +39 0523 071924

E. leura@leura.it
www.leura.it

Istruzioni

- 1- **MONTAGGIO:** appoggia la seduta sulla base in modo che questa entri perfettamente in sede; avvita le due viti che trovi nella confezione; inserisci nella base l'appoggiapiedi;
- 2 - Estrai l'appoggiapiedi quando usi la poltrona e riponilo nella base prima di alzarti spingendolo con i calcagni;
- 3 - Per spostare la poltrona: reclinala leggermente tenendola dallo schienale e trascinala all'indietro; le due piccole ruote nella parte posteriore della base faciliteranno l'operazione.

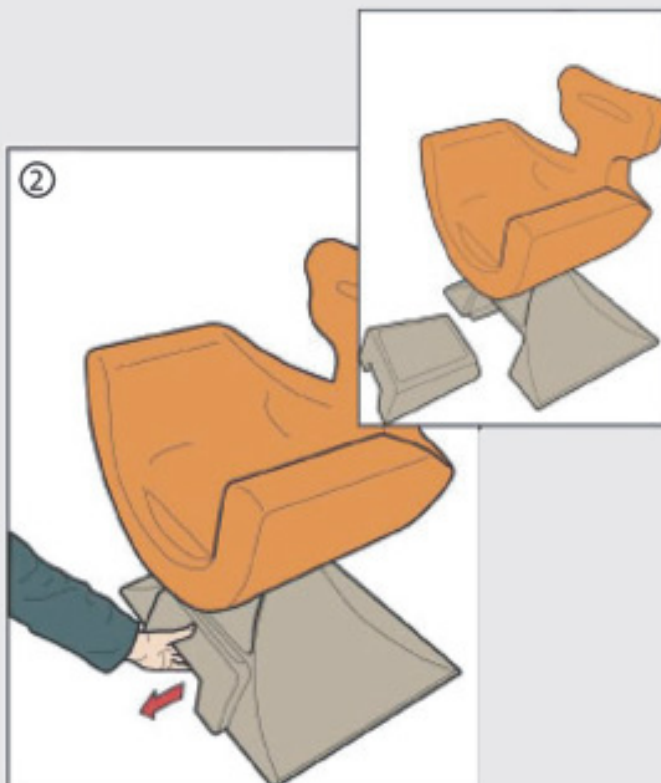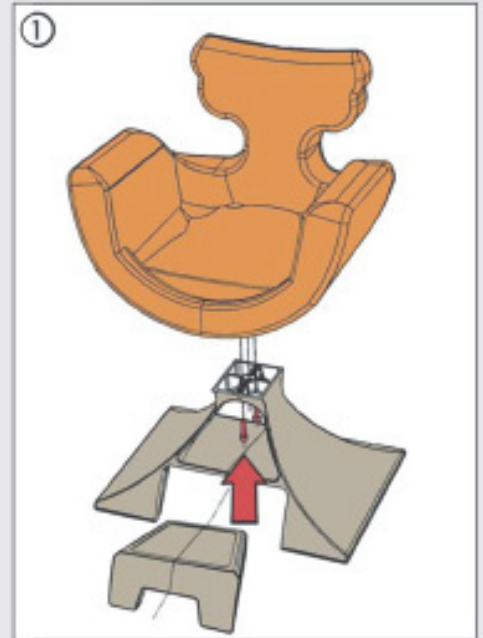

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
 Via San Giovanni 38/B 29100 Piacenza
 Cod. Fisc. 02958860989 Num. REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
 Via Vitali 3 29121 Piacenza - Italy
 T. +39 0523 757086 F. +39 0523 071924

E. leura@leura.it
www.leura.it



LEURA s.r.l.
SEDE LEGALE
Via San Giovanni 38/B
29100 Piacenza
Cod. Fisc. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA :
Via Vitali, 3
29121 Piacenza - Italy
T. +39 0523 757086 F. +39-0523-071924
E. leura@leura.it - www.leura.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY

Il Fabbricante **LEURA S.r.l.** dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo
The Manufacturer **LEURA S.r.l.** declares under its own responsibility that the device

Modello o nr. Articolo Model or nr. Article	Denominazione Denomination	Classificazione CND CND Classification	N° Repertorio N° Repertoire
365900	POLTRONA PER L'ALLATTAMENTO MIMMAMÀ ® ARMCHAIR FOR BREAST-FEEDING MIMMAMÀ ®	V0802	191102/R

Classe di Appartenenza **I**
Classification

soddisfa tutte le disposizioni applicabili nella Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici.
satisfies all applicable dispositions of Directive 93/42/CEE on Medical Devices.

A tale scopo garantisce e dichiara, per il dispositivo in oggetto che soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE.

To such purpose, guarantees and declares, pertaining to the above-named device, the following that it satisfies the essential requirements requested by Annex I of Directive 93/42/CEE;

Il Dispositivo Medico, è realizzato anche in conformità alle seguenti Norme Tecniche:

The Medical Device is manufactured also in conformity with the following Technical standards:

- CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) per i punti applicabili (for the applicable points)

Inoltre LEURA s.r.l. si impegna a:

Moreover LEURA s.r.l. is committed to:

- conservare e a tenere a disposizione dell'Ente Notificato la documentazione tecnica specificata al punto 3 dell'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione del prodotto. La suddetta documentazione supporta la presente dichiarazione di conformità;
keep the technical documentation specified at point 3 of Annex VII of Directive 93/42/CEE at the disposal of the Notified Body for a period of five years from the date of manufacture of the product. The aforesaid documentation supports this declaration of conformity;
- mantenere un sistema appropriato per monitorare il dispositivo, nella fase successiva a quella di produzione, e ricorrere alle misure correttive eventualmente necessarie, secondo quanto prescritto nell'Allegato VII.
maintain an appropriate system for the monitoring of the device, in the phase successive to that of production, and to apply eventual necessary corrective measures, as prescribed in Annex VII.

Si dichiara pertanto che il dispositivo in oggetto è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE, e che verrà immesso in commercio con la marcatura CE, secondo quanto disposto dall'Articolo 17 della direttiva 93/42/CEE.

It is therefore declared that the above-named device is in conformity with as much as prescribed by Directive 93/42/CEE and that it will be put on the market with the CE mark, according to the dispositions of Article 17 of Directive 93/42/CEE.

Data: 28 APRILE 2009

Date: 28 APRIL 2009

Firma del Legale Rappresentante

Signature of Legal Representative

Milhi Balleri



Pistoia, 21 aprile 2009

Il personale del Punto Nascita dell'Ospedale di Pistoia lavora da molti anni per migliorare l'assistenza al neonato, in particolare con una costante ed attenta attività di promozione dell'allattamento al seno.

Subito dopo il parto, la presenza di lacerazioni e tumefazioni può rendere difficoltosa per la donna la posizione seduta; particolare attenzione, quindi, deve essere rivolta a favorire le posizioni più comode per allattare al seno, cercando di eliminare i disagi del dopo parto.

Nel 2007, grazie all'indispensabile aiuto progettuale dell'architetto Mitzi Bollani, abbiamo potuto realizzare una poltrona comoda e funzionale per facilitare la posizione della mamma nell'allattamento, chiamata MimmaMà.

MimmaMà ha un particolare design che ricorda l'immagine poetica di una donna che accoglie in grembo la mamma e la sua particolare seduta è studiata e modellata in modo da non creare pressioni sulle parti doloranti. La particolare conformazione, inoltre, consente un appoggio ottimale a testa, spalle e zona lombare.

MimmaMà è particolarmente facile da pulire e sanificare, quindi molto più igienica delle poltrone in tessuto e più sicura perché priva di cuciture.

L'esperienza con l'utilizzo della poltrona nel nostro Punto Nascita negli ultimi due anni si è rivelata estremamente positiva.

Rino Agostiniani

Azienda USL 3 Pistoia



Azienda USL 3 di Pistoia
C.F. - P. IVA 01241740479
Via Sandro Pertini, 708
51100 Pistoia
www.usl3.toscana.it

U.O. Pediatria
Ospedale di Pistoia

Direttore
Dott. Rino Agostiniani

Viale Matteotti 19
51100 Pistoia
Tel. 0573 352369
Fax 0573 352064
r.agostiniani@usl3.toscana.it