



PRODOTTI INNOVATIVI MOTHER FRIENDLY



Leura

C.E.O. Mitzi Bollani

il nostro motto è «Helpful Design»

100% Made in Italy

Presentazione Aziendale

Leura s.r.l. è un'azienda dinamica che coglie i bisogni dell'utenza, progetta e produce prodotti per creare benessere e facilitare le azioni quotidiane, assicurando autonomia, facilità d'uso, comfort, salute e sicurezza, garantendo un alto valore prestazionale e al tempo stesso emozionale. Pur nascendo per risolvere problematiche specifiche, i prodotti Leura, progettati dall'arch. Mitzi Bollani - esperta europea in Design for All, sono flessibili e utili per tutti. Per portare alcuni esempi: MimmaMà poltrona specifica per l'allattamento, assolve le sue peculiarità con un design che offre a tutti un ottimo scarico muscolare della schiena e permette di lavorare con un notebook sulle ginocchia in modo molto più confortevole di altre sedute; NiDondolo gioco di movimento studiato in particolare per bambini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, è un gioco attivo che sviluppa le capacità propriocettive ed è adatto a un ampio range di età dal neonato all'adulto, diventando anche strumento di riabilitazione. Per questo abbiamo chiamato «Helpful Design» il nostro approccio olistico e multidisciplinare.

L'ambiente che ci circonda è la nostra seconda pelle ed influenza il nostro benessere psico-fisico. Il rispetto di multiculturalità, genere e età sono per Leura s.r.l. uno stimolo a realizzare prodotti innovativi, facilmente fruibili, socialmente utili, personalizzabili e altamente notiziabili. Il metodo di lavoro si basa sull'applicazione di standard ergonomici e funzionali uniti a alti valori estetici e prestazionali. Ciò permette non solo di giungere a inaspettate soluzioni, ma di trovare nuove strade per il progetto di marketing e di vendita. Leura s.r.l. propone una gamma di prodotti innovativi che ben si prestano come servizi alla clientela, componibili e personalizzabili a seconda del bisogno sia dell'utenza che dell'Azienda stessa, raccogliendo la soddisfazione della clientela e sviluppandone la sua fidelizzazione.

Leura s.r.l. è stata fondata nel 2008 e è tuttora guidata dall'Arch. Mitzi Bollani - esperta in architettura e sostenibilità sociale. Per questo motivo i prodotti rappresentano sempre un concetto di diritto alla salute, partecipazione, tutela dell'infanzia, rispetto delle diversità... L'architetto Bollani è sempre felice di collaborare con Aziende, Istituzioni e Professionisti offrendo consulenze per la realizzazione di ambienti coadiuvanti a misura di tutti.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MimmaMà

by Leura



MimmaMà

Designer Arch. Mitzi Bollani



poltrone per l'allattamento al seno

Dispositivi Medici CE

Descrizione Generale

Le poltroncine MimmaMà sono le uniche specificatamente studiate per facilitare l'allattamento al seno sostenendo mamma e bambino in tutte le diverse posizioni: a culla, incrociata, a rugby o sottobraccio, detta anche a tandem, per nutrire due gemelli contemporaneamente. Ogni MimmaMà conferisce alle donne un comfort che letti e sedie non sono in grado di garantire, è un eccellente esempio di design italiano che associa prestazioni ergonomiche ad una forma singolare: l'immagine poetica di una figura femminile che abbraccia e protegge la neo-mamma e il suo bambino.

Ergonomica, morbida e comoda, MimmaMà è modellata con particolare attenzione anche nella parte di seduta, per sostenere la struttura ossea e non esercitare pressioni sul perineo, riducendo così i dolori post parto causati da ferite chirurgiche o complicanze. MimmaMà offre un ottimale supporto a spalle, braccia e zona lombare evitando alla mamma anche i dolori posturali; l'ampiezza dei suoi braccioli e la loro continuità arrotondata consentono di trovare il miglior appoggio sia per la neo-mamma che per il neonato. Un pratico poggiatesta consente alle donne di conservare la corretta posizione della propria schiena e di rilassarsi, mentre un morbido cuscino facilita il sostegno del bambino durante l'allattamento quando è molto piccolo. MimmaMà è un prodotto Made in Italy tappezzato in ecopelle da abili artigiani italiani che hanno saputo sapientemente rivestirla seguendo le linee sinuose che la rendono inconfondibile.

MimmaMà è un dispositivo medico con dichiarazione CE incluso nella liste del Ministero della Sanità italiano e registrato all'Australian TGA. Ignifuga, antibatterica, priva di lattice e facile da igienizzare, MimmaMà si inserisce facilmente in ogni ambiente assicurando a tutti il massimo comfort.



- + Schienale sfiancato per posizione tandem
- + Ampi e morbidi braccioli arrotondati
- + Supporto lombare e di spalle e schiena
- + Modellazione che evita pressione sul perineo
- + Ignifuga, antibatterica e priva di lattice



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Dispositivi Medici CE: art. 365900X

Made in Italy

Dati Tecnici

Poltrone allattamento realizzate in poliuretano espanso con telaio interno in tubolari di ferro e rivestimento esterno in ecopelle PVC espanso in foglia con supporto in tessuto. La seduta è disponibile nei colori lilla, giallo, verde e bianco nei modelli: MimmaMà 365900N, MimmaMà 365900L e MimmaMà 365900S

Accessori:

- poggiapiedi Tuki in poliuretano morbido autopellante colore bordeaux;
- cuscino d'allattamento in fiocco vergine siliconato di poliestere con doppia fodera.

Categoria: poliuretano PVC e leghe metalliche

Colori: sedute lilla, verde chiaro, bianco e giallo; basi bordeaux, cromato lucido

Classe di Resistenza al Fuoco: 1IM

Carico di Lavoro Sicuro: 130 Kg



MimmaMà 365900N

Poltrona con base in alluminio verniciato bordeaux con poggiapiedi incluso. Dimensioni: (LxWxH) 74x67x93 cm
Peso: 23 kg

MimmaMà 365900L

Poltrona girevole con base zavorrata a disco in acciaio inox cromato lucido. Dimensioni: (LxWxH) 74x67x90 cm
Peso: 27 kg

MimmaMà 365900S

Poltrona con gambe a arco in tubolari di ferro verniciato grigio e piedi regolabili. Dimensioni: (LxWxH) 74x67x91 cm
Peso: 13 kg

ACCESSORI



Mabeby 365900C

Cuscino d'allattamento in fiocco vergine siliconato di poliestere con doppia fodera, quella esterna è in ecopelle PVC bianca con cerniera zip. Dimensioni: (LxWxH) 44x24x11/14cm

Tuki 365900P

Poggiapiedi in poliuretano morbido autopulente colore bordeaux. Incluso in MimmaMà 365900N e abbinabile a tutti gli altri modelli. Dimensioni: (LxWxH) 37x40x10/14 cm



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MimmaMà

Designer Arch. Mitzi Bollani

Soluzioni Personalizzate e Colori

Dati Tecnici

MimmaMà può essere realizzata anche in soluzioni e colori on-demand. Particolarmente interessanti sono le versioni in barra.



MimmaMà 365900R3

Tre poltrone MimmaMà su base in barra di acciaio lineare con piedi fissi.
Dimensioni: (LxWxH) 300x67x91 cm



MimmaMà 365900R2

Due poltrone MimmaMà su base in barra di acciaio lineare con piedi fissi.
Dimensioni: (LxWxH) 190x67x91 cm

COLORI STANDARD

Energetici per influenzare emozionalmente le mamme e ridurre il rischio di depressione post parto



Lilla cod. 5947



Giallo cod. 64



Verde cod. 1816



Bianco cod. 1200

COLORI ON DEMAND per ordini di minimo 15PZ

Rosso cod. 680

Azzurro cod. 1925

Blu cod. 1915

Verde cos. 872

Blu cod. 1944

Arancione cod. 41

Marrone cod. 1270

Viola cod. 5946

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Dichiarazione di Conformità UE EU Conformity Declaration

Leura Srl in qualità di Fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione richiesti dall'allegato I del Regolamento (UE) 2017/745 e successive modifiche integrative.

Leura Srl as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the General Requirements for Safety and Performance required by annex I of Regulation (EU) 2017/745.

Fabbricante / Manufacturer	LEURA Srl - Via Cavour, 43 29121 Piacenza (PC) - ITALIA
Nome del dispositivo / Device name	"MimmaMa®"
Codifica (codice REF) / Codification (REF code)	365900X <i>Dove X= S, N, L e identifica i modelli della poltrona</i> <i>Where X= S, N, L and identifies the armchair models</i>
Classificazione / Classification	Classe I / Class I Regola 1, Allegato VIII Regolamento (UE) 2017/745 Rule 1, Annex VIII Regulation (EU) 2017/745
CND Classificazione / Classification	V0802
Nr. Repertorio / No. Repertoire	191102/R

Qualunque modifica apportata al Dispositivo Medico, se non autorizzata da Leura Srl, annulla la validità della presente dichiarazione.

Any modification applied to the medical device, if not expressly authorized by Leura Srl, cancel the validity of this declaration.

Si dichiara che i dispositivi in oggetto ottemperano alle seguenti norme tecniche:

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, are conform to the following technical standards:

- UNI CEI EN ISO 14971: 2012
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017
- UNI EN 1041:2008 + A1-2013
- UNI EN ISO 10993-1:2018

Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in confezione non sterile.

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, is commercialized in non-sterile package.

Si dichiara che la scrivente terrà a disposizione dell'Autorità Competente la documentazione di cui all'Allegato I, II e III del Regolamento (UE) 2017/745 per un periodo di 10 anni a partire dall'ultima data di produzione dei dispositivi in oggetto.

It's here declared that the subscribing company will keep all the documents mentioned in Annex I, II and III of Regulation (EU) 2017/745 available for Competent Authority for a period of 10 years from the last production of the device to which this declaration is addressed to.

Piacenza (PC), 27.05.2020

LEURA S.r.l.
Sede Leg.: Via Cavour, 43
29121 - PIACENZA
Sede Operat.: via Vitali, 3 - 29121 PIACENZA
C.F. e P.IVA 02958860989

Legale Rappresentante
Legal Representative

Arch. Mitzi Bollani
Leura Srl

Public Summary

Summary for ARTG Entry: 224982 Adventist HealthCare Ltd - Chair, <specify>

ARTG entry for	Medical Device Included Class 1
Sponsor	Adventist HealthCare Ltd
Postal Address	Pathology, 185 Fox Valley Road, WAHROONGA, NSW, 2076 Australia
ARTG Start Date	25/06/2014
Product category	Medical Device Class 1
Status	Active
Approval area	Medical Devices

Conditions

The automatic conditions applicable to the inclusion of all kinds of medical devices in the Register are as specified in section 41FN of the Therapeutic Goods Act 1989.

The standard conditions that are imposed under section 41FO of the Therapeutic Goods Act 1989 when kinds of medical devices are included in the Register are as set out in the following paragraphs.

For a medical device included in the Register under Chapter 4 and imported into Australia, the Sponsor must ensure that information about the Sponsor is provided in such a way as to allow the sponsor to be identified.

Each sponsor shall retain records of the distribution of all of the sponsor's medical devices included in the Register under Chapter 4. In the case of records relating to a Class AIMD medical device, Class III medical device, or Class IIb medical device that is an implantable medical device, the distribution records shall be retained for a minimum period of 10 years. In the case of records relating to any other device, the distribution records shall be retained for a minimum period of 5 years.

The sponsor of a medical device included in the Register under Chapter 4 shall keep an up to date log of information of the kind specified in Regulation 5.8.

It is a condition of inclusion in the ARTG that the sponsor of a medical device that is an AIMD, Class III or implantable Class IIb provides three consecutive annual reports to the Head of the Office of Product Review, Therapeutic Goods Administration following inclusion of the device in the ARTG (as specified in 5.8 of the regulations). Annual reports are due on 1 October each year. Reports should be for the period 1 July to 30 June. The first report following the date of inclusion in the ARTG must be for a period of at least six months but no longer than 18 months. Subsequent reports are to be provided on 1 October for a further 2 years. The annual report must include all complaints and adverse events received by the manufacturer relating to problems with the use of the device that have been received by them over the year. For orthopaedic implant prosthesis that have been re-classified from Class IIb to Class III medical devices, annual report information must be submitted if the device meets either of the following criteria: I. The device was subject to a TGA application audit based on revision rate when the device transitioned from Class IIb to Class III; and/or II. No devices were supplied to the Australian marketplace before 30 June 2012. As per the standard automatic condition, annual reports should be submitted each year for the first three years of inclusion as a Class III medical device on the ARTG.

Where a medical device included in the Register, contains a substance which is included in the Fourth Schedule to the Customs (Prohibited Imports) Regulations or the Eighth Schedule to the Customs (Prohibited Exports) Regulations the Sponsor shall, at the time of importation or exportation of the medical device, be in possession of a licence and a permission for importation or exportation of each consignment of the goods as required by those regulations.

A sponsor shall ensure that a medical device within their control is stored and transported in accordance with the instructions and information provided by the manufacturer.

Manufacturers

Name	Address
Leura Srl	Via Cavour 43 , Placenza, 29121 Italy

Products

1. Chair, <specify>

Product Type	Single Device Product	Effective date	25/06/2014
GMDN	10787 Chair, <specify>		
Intended purpose	GMDN- Chair, Breastfeeding {10787}is intended to be used as a seat for a breastfeeding woman which through design and fabric reduces post-patum pain.		


Specific Conditions

No Specific Conditions included on Record

Poltrone per l'Allattamento al Seno

Art. 365900N

Montaggio, Uso e Manutenzione

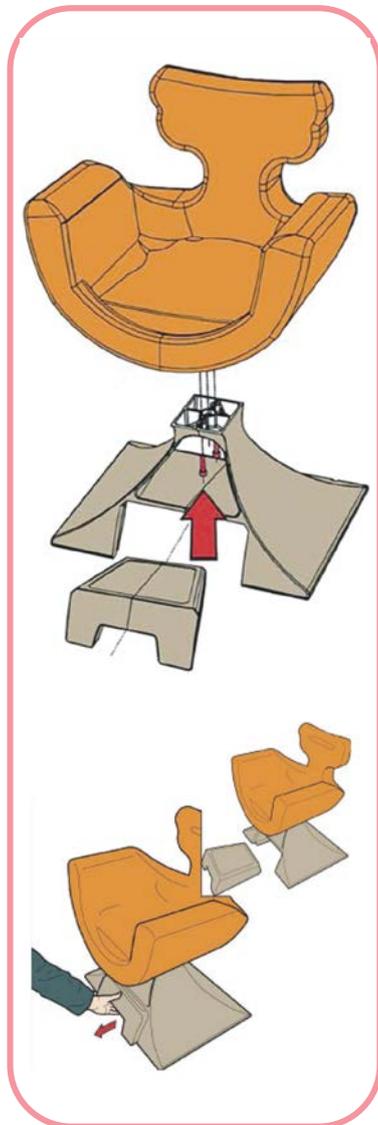

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Togliere la base e la seduta dall'imballo e posizionarli su una superficie piana e libera da ingombri. Appoggiare la seduta sulla base in modo che questa entri perfettamente in sede; fissare con le due viti del kit nella confezione; inserire il poggiatesta nella base.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili è la seguente:
- utilizzo del poggiatesta: per utilizzare il poggiatesta è necessario estrarlo con la mano o la punta del piede utilizzando l'apertura sul davanti. Posizionarlo alla distanza desiderata in base alla lunghezza delle gambe della mamma. Una volta terminato il suo uso, prima di alzarsi dalla poltrona, spingerlo indietro con i calcagni, fino a farlo rientrare.

MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto fissaggio delle viti ed in caso serrarle nuovamente. Si consiglia di pulire il rivestimento in ecopelle della poltrona almeno una volta a settimana per mantenere il perfetto stato del materiale. In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze pulire immediatamente con un panno umido ed asciugare.

CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato: poltrona per allattamento al seno. Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la poltrona con persone od oggetti sopra. Non sedersi, salire o saltare su schienale, braccioli e poggiatesta. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi negli interstizi tra poggiatesta e base della poltrona. Per la pulizia non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati. Per il montaggio non utilizzare componenti diversi da quelli presenti nel kit fornito con la poltrona.

SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e quindi consegnarli presso un punto di smaltimento.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Poltrone per l'Allattamento al Seno

Art. 365900L – Art. 365900S

Montaggio, Uso e Manutenzione



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Togliere la base e la seduta dall'imbello e posizzarli su una superficie piana e libera da ingombri. Appoggiare la seduta sulla base in modo che questa entri perfettamente in sede; fissare con le quattro viti del kit nella confezione; inserire il poggipiedi nella base.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili sono le seguenti:
- rotazione seduta (modello 365900L): sedersi sulla poltrona e con le punte dei piedi puntate a terra spingersi nella direzione desiderata.

MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto fissaggio delle viti ed in caso serrarle nuovamente. Si consiglia di pulire il rivestimento in ecopelle della poltrona almeno una volta a settimana per mantenere il perfetto stato del materiale. In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze pulire subito con un panno umido ed asciugare.

CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato: poltrona per allattamento al seno. Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la poltrona con persone od oggetti sopra. Non sedersi, salire o saltare su schienale, braccioli e poggipiedi. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi negli interstizi della poltrona. Per la pulizia non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati. Per il montaggio non utilizzare componenti diversi da quelli presenti nel kit fornito con la poltrona.

SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e consegnarli presso un punto di smaltimento.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MimmaMà

Designer Arch. Mitzi Bollani



Poltrone per l'Allattamento al Seno

Dispositivi Medici CE

Galleria Immagini



Alcune foto delle poltrone d'allattamento MimmaMà inviate dai nostri Clienti in Italia e all'Estero.

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MimmaMà Point

by Leura



MimmaMà Point

Designer Arch. Mitzi Bollani



MimmaMà Point
ALLATTAMENTO E COCCOLIF

Spazi per l'Allattamento al Seno

Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Descrizione Generale

MimmaMà Point sono spazi d'allattamento, attrezzato con la poltrona MimmaMà, che garantiscono alla mamma un luogo sicuro, funzionale, accogliente in cui allattare, coccolare e tranquillizzare il proprio bambino senza distrazioni. Biblioteche, centri commerciali, aeroporti, farmacie, bar, supermercati, fiere, parchi... sono luoghi ideali in cui posizionare MimmaMà Point offrendo così un servizio altamente qualificato per la mamma che si trova fuori casa. Una mamma felice è una cliente soddisfatta e le aziende che promuovono questi servizi ne ricavano grandi benefici indotti.

L'allattamento è un Diritto di Tutti e va incoraggiato: MimmaMà Point facilita le azioni quotidiane fuori casa della mamma, rendendola più serena e di conseguenza più disponibile a prolungare il periodo dell'allattamento, pratica che influenzerà la salute sua e del bambino per tutta la loro vita.

Allattare in uno spazio pubblico non è sempre facile: la mamma e il suo bambino hanno diritto a privacy e tranquillità, per vivere al meglio la loro relazione unica. MimmaMà Point garantisce facilità di pulizia, intimità e sicurezza, è un servizio socialmente utile che facilita un momento speciale della vita delle mamme, diventando occasione di buona reputazione e passaparola.

MimmaMà Point prende il nome da MimmaMà: l'unica poltrona ergonomicamente studiata per aiutare le donne nelle diverse posizioni di allattamento. Queste strutture autoportanti sono realizzate in diverse forme e dimensioni e rivestite in tessuto stretch con stampa mono o bi-facciale adatta anche come supporto pubblicitario.



- + Autoportante
- + Ignifugo
- + Personalizzabile in forma, dimensioni e grafica
- + Rivestimento sostituibile nel tempo
- + Equipaggiato con la poltrona MimmaMà



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube





MimmaMà Point

Designer Arch. Mitzi Bollani



MimmaMà Point
ALLATTAMENTO E COCCOLIF

Spazi per l'Allattamento al Seno

Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Dati Tecnici

Stand e paraventi composti da:


- struttura portante in tubolari di alluminio a sezione tonda (diametro 35 / 50 mm) scomponibili e montabili con meccanismo interno a vite con piastre di sostegno diametro 30 cm;
- rivestimento esterno lavabile in lavatrice a 30° in tessuto stretch ignifugo, chiuso con cerniera zip, stampato a colori ad acqua transfer sublimatico, stampa mono-facciale.

La stampa può essere realizzata anche su entrambi i lati del rivestimento con l'aggiunta di un liner interno che riduca la trasparenza del rivestimento. All'occorrenza si può integrare n piano fasciatoio nella struttura, anche se è sempre meglio separare l'area per il cambio pannolini, dallo spazio allattamento.

Categoria: alluminio e tessuto

Classe ignifugazione: B S1 D0

Dimensioni: personalizzabili

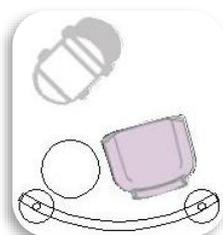


MimmaMà Point Basic

Paravento Dim. (LxWxH) 180x35x180cm

Codice struttura: **80.120 Paravento**

Codice poltrona: **365900X MimmaMà**

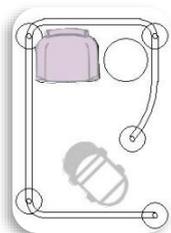


MimmaMà Point Smart

Stand Dim. (LxWxH) 150x130x180cm

Codice struttura: **80.330 Capsula NY**

Codice poltrona: **365900X MimmaMà**

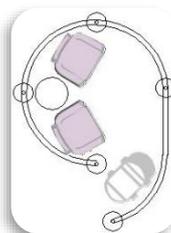

MimmaMà Point Double

Stand Dim. (LxWxH) 300x215x180cm

Codice struttura: **80.312 Chiocciola**

Codice poltrone: **365900X MimmaMà**

ACCESSORI: poltrone per l'allattamento al seno MimmaMà e tavolino Taby.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube





MimmaMà Point

Designer Arch. Mitzi Bollani



MimmaMà Point
ALLATTAMENTO E COCCOLE

Spazi per l'Allattamento al Seno

Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Grafiche

Leura s.r.l. studia e realizza grafiche personalizzate su richiesta del Cliente con loghi, immagini, scritte o disegni che evidenzino il servizio, veicolino messaggi di tutela della salute e valorizzino il contributo di eventuali sponsor. Il rivestimento esterno in tessuto elasticizzato è ignifugo, svestibile, lavabile e sostituibile nel tempo in caso di necessità.



Il logo MimmaMà Point Allattamento e Coccole posto su ogni postazione di allattamento al seno identifica un servizio di eccellenza dedicato alle famiglie con bambini piccoli al seguito. Per le loro qualità, i MimmaMà Point di Leura s.r.l. sono stati spesso scelti per sostenere i progetti Baby Pit Stop di Unicef e Nati per Leggere. Sono un'ottima soluzione in biblioteche, musei, Amministrazioni Pubbliche, Centri Commerciali, Aeroporti, Strutture Sanitarie e Sportive.

Dal 2015 le postazioni MimmaMà Point rientrano nella rete del progetto «Segui il cuore...». Il "Grazie" di tante mamme significherà aver trovato sostegno, intimità e funzionalità in un momento speciale della vita grazie a voi.



MimmaMà Point
ALLATTAMENTO E COCCOLE

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592


INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Spazi per l'Allattamento al Seno

Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Montaggio, Uso e Manutenzione

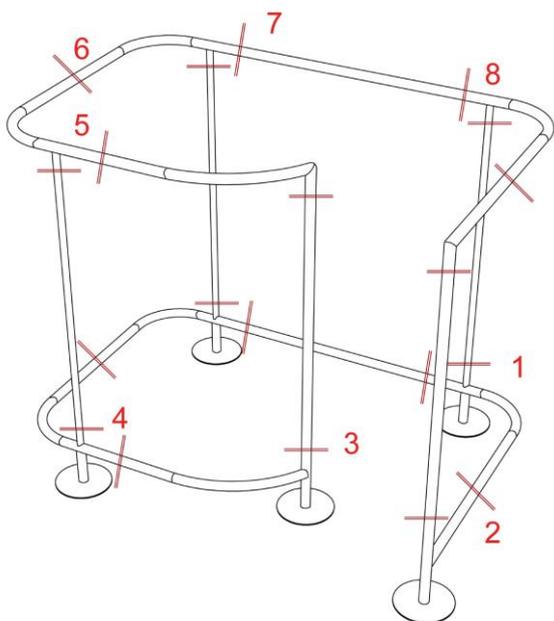

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - La struttura viene consegnata smontata; a ogni taglio eseguito sulla struttura corrisponde un'etichetta formata da una lettera e da un numero. Per il montaggio seguire le indicazioni delle etichette collocate sulla struttura, come esempio riportato. Una volta unite le due parti tirare la vite con la chiave Allen presente nell'imballo. Proseguire così fino al completamento della struttura. Quindi inserire il tondino pieno delle piastre di appoggio nel tubo della struttura in basso. Prima di posizionare il rivestimento controllare che lo spazio attorno sia pulito. Indossare i guanti presenti nell'imballo, prendere il tessuto ed inserirlo dall'alto verso il basso, come una calza. Assicurarsi che le cuciture siano perfettamente allineate e chiudere lungo il perimetro in basso con la cerniera. Posizionare il paravento o stand così composto su una superficie perfettamente piana.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - La struttura può essere lavata con sapone neutro ed acqua pulita. Il tessuto stretch del rivestimento può essere rimosso e lavato in lavatrice a 30°.

CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato. Non esporre il dispositivo a forti temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non appoggiarsi alla struttura. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti vicino alla struttura. Per pulire il telo rimuoverlo dalla struttura.

SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e consegnarli presso un punto di smaltimento.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MimmaMà Point

Designer Arch. Mitzi Bollani



MimmaMà Point
ALLATTAMENTO E COCCOLE

Spazi per l'Allattamento al Seno

Autoportanti, Ignifughi e Personalizzabili

Galleria Immagini



Alcune foto di spazi allattamento MimmaMà Point inviate dai nostri Clienti in Italia e all'Estero.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





PuSiCo

by Leura



PuSiCo

Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato

Descrizione Generale

PuSiCo è un fasciatoio con lavabo integrato facile da igienizzare perché realizzato in pietra acrilica, vellutata e calda al tatto. Modellato con forme arrotondate sia per garantire la sicurezza del bambino che per facilitare la sanificazione. La sua linea è appositamente studiata per aiutare la mamma nella pulizia del bebé e nel cambio pannolini, infatti quando il bebé è molto piccolo è possibile utilizzare direttamente il lavabo come vaschetta per il bagnetto. PuSiCo consente alla mamma di sostenere il bambino nel modo corretto e di poterlo trasferire senza difficoltà dal lavabo al piano fasciatoio per la vestizione o il cambio pannolino.

PuSiCo (pulizia, sicurezza e comfort) è realizzato in 3 versioni: con struttura autoportante, totalmente sospeso oppure sospeso con due gambe anteriori di rinforzo. Questo fasciatoio può essere realizzato con vaschetta di profondità 90 o 180mm e con lunghezza adattabili.

A scelta del Cliente il lavabo viene collocato a destra o a sinistra del piano fasciatoio. Leura srl consiglia l'utilizzo di un rubinetto con il punto di erogazione alto, in modo da agevolare le operazioni di igiene del bambino, con un comando a leva per agevolarne l'azionamento anche con il gomito.

PuSiCo è un elemento della Family Toilet di Leura a misura di famiglia.



- + Angoli arrotondati per garantire sicurezza
- + Superficie antigraffio calda e vellutata al tatto
- + Utilizzabile da persone su sedia a ruote
- + Lunghezza di misura adattabile
- + Lavabo posizionato a destra o sinistra
- + I liquidi scaricano direttamente nel lavabo

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





PuSiCo

Designer Arch. Mitzi Bollani

Fasciatoio con Lavabo Integrato

Dati Tecnici

PuSiCo è realizzato in pietra acrilica bianca di spessore 9mm, con lavandino termoformato, veletta frontale, alzatina posteriore e tre staffe di sostegno. Dimensioni: (LxPxH) 140x53x20 cm. Lunghezza personalizzabile +/- 10 cm. Il suo lavabo è profondo 9 cm e può essere posizionato a destra o a sinistra. I rubinetti sono esclusi. È disponibile in tre versioni: sospesa a muro, sospesa con due gambe anteriori di rinforzo in alluminio e con struttura in alluminio autoportante. Disponibile anche con alzatina frontale di sicurezza.

Categoria: pietra acrilica e alluminio

Colore: bianco

Classe di resistenza al fuoco: classe 1

Carico di lavoro sicuro: 40 kg

PuSiCo 40.130

Sospeso

Peso: 24kg

Dim.: (LxWxH) 140x53x20 cm



PuSiCo 40.140

Con due gambe di rinforzo

Peso: 31kg

Dim.: (LxWxH) 140x53x90 cm



PuSiCo 40.150

Struttura Autoportante

Peso: 34kg

Dim.: (LxWxH) 140x53x90 cm



PuSiCo 40.160

Lavabo profondo 18cm. Disponibile nelle tre versioni.

Peso: 27kg

Dim.: (LxWxH) 160x60x25 cm



PuSiCo 40.131

Con alzatina di sicurezza

Peso: 26kg

Dim.: (LxWxH) 140x58x20 cm



Accessori venduti separatamente:

- piletta cromata lucida;
- sifone cromato lucido;
- rubinetto cromato lucido con miscelatore mono-comando.

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Fasciatoio con Lavabo Integrato

Montaggio, Uso e Manutenzione

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

GARANZIA DI QUALITA'


Il fasciatoio con lavabo integrato di Leura srl è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti dovuti ad un uso non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a modifiche fatte al prodotto. Il naturale consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo sfregamento o all'uso improprio di detersivi non sono un difetto di fabbricazione.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.


ATTENZIONE: MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO SUL PIANO FASCIATOIO O NELLA VASCHETTA LAVABO.

ISTRUZIONI E SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL BAMBINO.






Modelli Sospesi a Muro

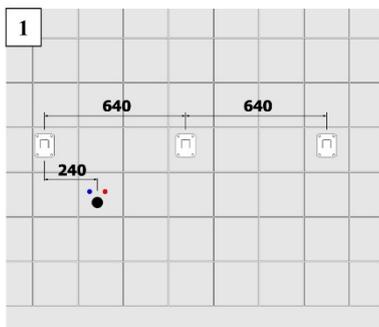

VERSIONE SINISTRA - LEFT VERSION - VERSION GAUCHE -
VERSION LINKS - VERSIÓN IZQUIERDA

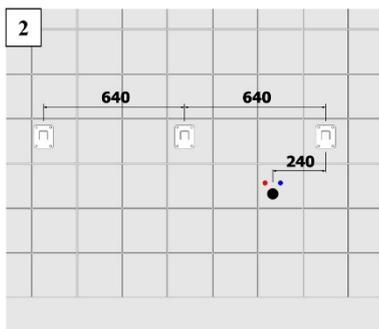

VERSIONE DESTRA - RIGHT VERSION - VERSION RECHTS -
VERSION DROITS - VERSIÓN DERECHO

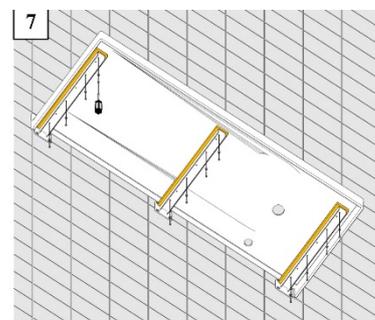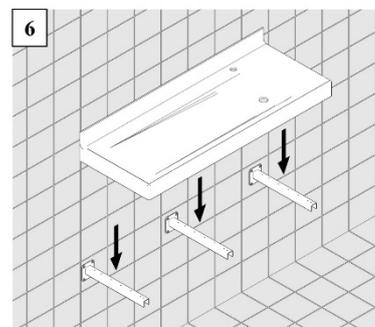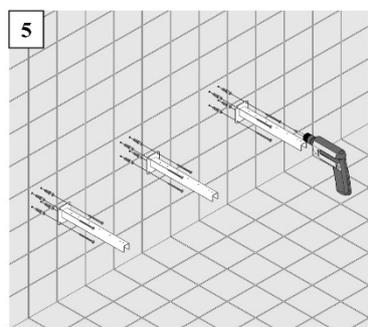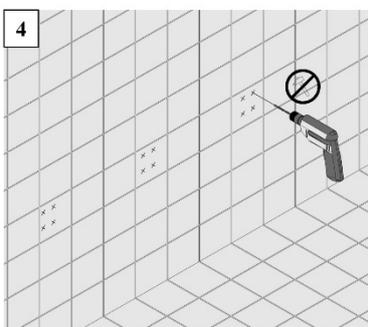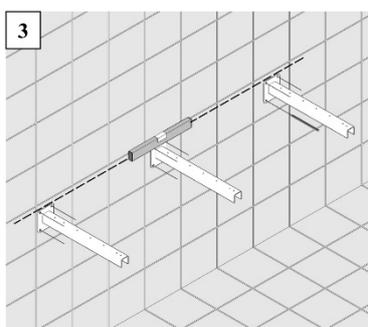

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

















INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Fasciatoio con Lavabo Integrato

Montaggio, Uso e Manutenzione

Modelli con Gambe di Supporto

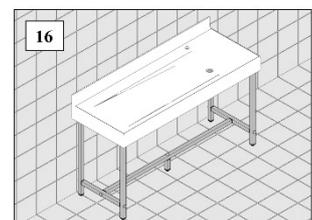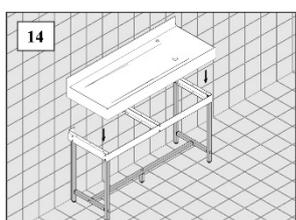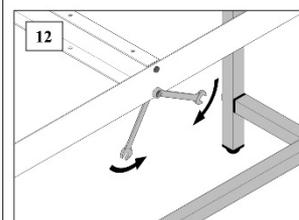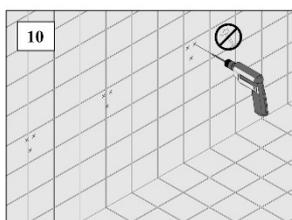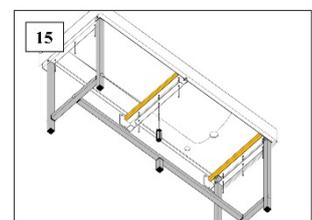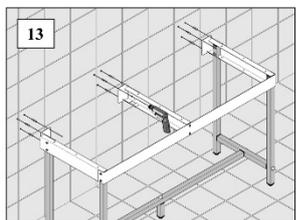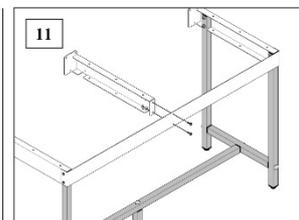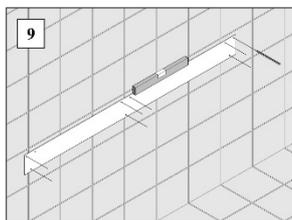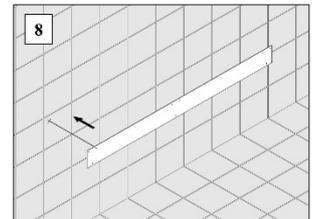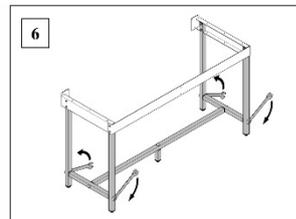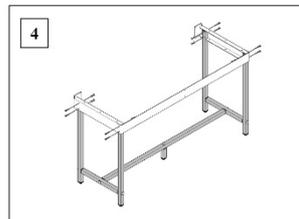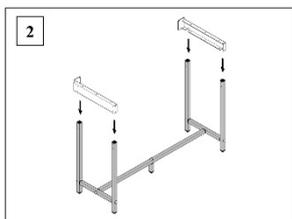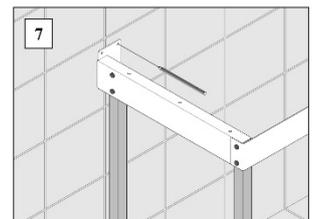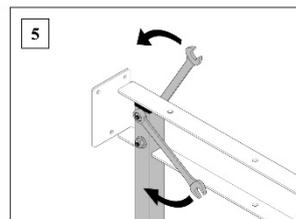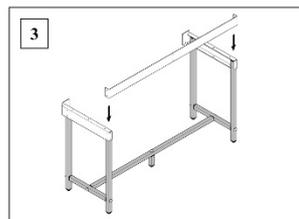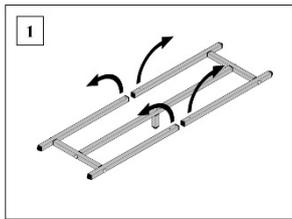

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Sign On
by Leura



Sign on

Designer Arch. Mitzi Bollani

Decorazioni Murali Ignifughe

Per qualificare in modo emozionale gli ambienti

Descrizione Generale e Dati Tecnici

Sign On è una decorazione digitalizzata e stampata su pellicole che possono essere applicate a muro o su qualunque altra superficie liscia. Sign On è nata per qualificare in modo emozionale gli ambienti anche di piccole dimensioni. Utilizzando le illusioni ottiche del disegno, gli ambienti anche se ridotti diventano estremamente accoglienti. Le illustrazioni possono essere applicate a pareti e soffitto, eliminando l'effetto scatolare e la misurabilità delle stanze. Sign On crea ambienti energeticamente positivi ed emozionali e consente di rinnovare velocemente lo spazio in cui si interviene perché non occorrono demolizioni di piastrelle e relativi trasporti a discarica.

Sign On è stampata su PVC ignifugo ad alto tack adesivo stabilizzato nel tempo e stampato in tecnologia digitale ad alta definizione, protetto con film trasparente con filtro UV che oltre a proteggere la cromaticità del colore nel tempo lo preserva anche da piccole abrasioni e dall'utilizzo di detergenti non aggressivi o abrasivi. Sign On può essere posizionata direttamente sulle pareti, anche piastrellate, preventivamente rasate con un primer isolante. Sign On può inoltre essere completato con pellicola antimicrobica.

Pulizia: usare un panno morbido e umido imbevuto con sapone liquido, non usare detergenti abrasivi candeggina o acidi forti.



- + Rinnova gli ambienti velocemente
- + Ignifugo
- + Amplia gli spazi di piccole dimensioni
- + Rende emozionale ogni ambiente

Sign On 80.800 pellicola PVC ignifuga ad alto tack adesivo stampata per pareti e soffitti
Finiture e colori: grafiche personalizzate on demand
Dimensioni: su richiesta al mq

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it







Sign on

Designer Arch. Mitzi Bollani

Decorazioni Murali Ignifughe

Per qualificare in modo emozionale gli ambienti

Esempi

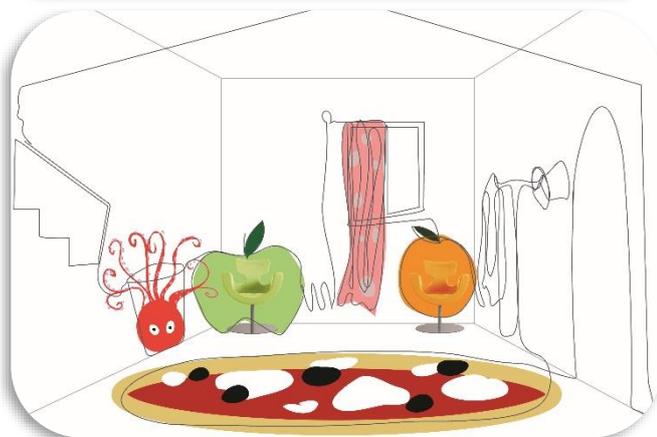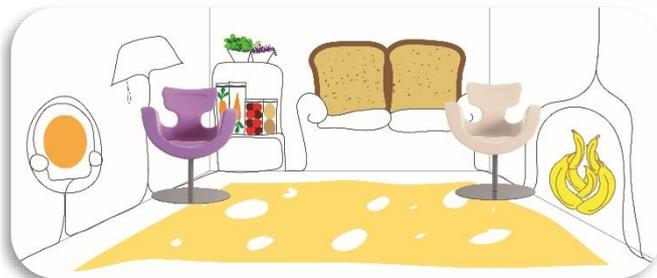

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MaBim

by Leura

Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Descrizione Generale

MaBim è una culla appositamente disegnata per favorire il co-sleeping sicuro e consentire il trasporto del neonato. Dormire accanto al proprio bambino è una pratica molto comune in tutto il mondo che facilita l'avvio dell'allattamento al seno, il legame materno e la capacità di risposta della madre ai bisogni del piccolo. Il neonato stando vicino alla mamma regola la temperatura corporea e il suo sonno è più tranquillo: per questo gli ospedali oggi attivano il rooming-in, che prevede che mamma e bambino restino nella stessa camera 24h/24h da subito dopo il parto.

Grazie al lato rotante apribile di MaBim, ogni madre può dormire in stretto contatto con il suo piccolo e prenderlo in braccio per allattarlo senza doversi alzare dal letto: questo è un grande vantaggio soprattutto per le persone che hanno avuto un lungo travaglio, un'anestesia epidurale o un taglio cesareo. Il neonato dorme accanto alla mamma disteso sul suo materassino evitando così i rischi di caduta o schiacciamento possibili nel bedding-in, quando il bebé dorme nel letto con la mamma.

MaBim è totalmente trasparente per facilitare il monitoraggio costante dei neonati ed ha altezza variabile per affiancare e sormontare ogni letto e accostarsi facilmente a sedie a ruote. Il suo fianco apribile agevola il co-sleeping e le visite mediche al bebé. Le forature semplificano la manovrabilità, la pulizia e il passaggio di cateteri e cavi di materassi riscaldati o fototerapici. La culla è un prodotto Made in Italy, realizzato con materiali riciclabili. MaBim Twins è la versione per i gemelli che permette di continuare la loro speciale relazione. Su richiesta, MaBim e MaBim Twins possono essere completate con materassini ignifughi e un pratico ripiano portaoggetti.



- + Sponda apribile per il co-sleeping sicuro
- + Totale trasparenza per monitorare il bebé
- + Altezza variabile
- + Accosta ogni letto e sormonta il materasso
- + Ruote con freno per il trasporto del neonato
- + Utilizzabile da persone su sedia a ruote

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





MaBim

Designer Arch. Mitzi Bollani



Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Dati Tecnici

Le culle MaBim per il co-sleeping sicuro composte da:

- culla in PMMA trasparente con fianco rotante apribile, boccole in acciaio inox e tappi copriboccole in polietilene;
- base zavorrata verniciata in colore bianco RAL 9003 con ruote con freno e colonna con sistema di sollevamento a gas;
- cinghia di sicurezza regolabile in poliesteri con passante di regolazione e fibbia di chiusura colore bianco.

Categoria: metacrilati, alluminio, ferro

Colori: culla trasparente e base bianca

Classe di Resistenza al Fuoco: classe E

Carico di lavoro Sicuro: 25kg

MaBim 50.120MB: Culla singola

Peso Totale: 23,5 kg

Dim. Totali: (LxWxH) 75x44x86/114 cm

Dim. Culla: (LxWxH) 75x44x28 cm

Dim. Piano Culla: (LxW) 68x37 cm

MaBim Twins 52.120MBT: culla gemellare

Peso Totale: 25,50 kg

Dim. Totali: (LxWxH) 75x59x86/114 cm

Dim. Culla: (LxWxH) 75x59x28 cm

Dim. Piano Culla: (LxW) 68x50 cm

50.120MT Maby: materassino ignifugo di dimensioni (LxWxH) 68,5x37,5x6 cm

52.120 MT Maby Twins: materassino ignifugo (LxWxH) 68,5x50,5x6 cm

ACCESSORI

50.220MT MaBy Trend elemento per posizione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg

50.320AP Ripiano Portaoggetti in metacrilato trasparente fissata alla piastra sottoculla con tondini di ferro verniciati;

50.420PN Targhetta Portanome in PMMA trasparente (LxW) 18x13



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Dichiarazione di Conformità UE EU Conformity Declaration

Leura Srl in qualità di Fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione richiesti dall'allegato I del Regolamento (UE) 2017/745 e successive modifiche integrative.

Leura Srl as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the General Requirements for Safety and Performance required by annex I of Regulation (EU) 2017/745.

Fabbricante /Manufacturer	LEURA Srl - Via Cavour, 43 29121 Piacenza (PC) - ITALIA	
Nome del dispositivo/Device name	"MaBim®"	
Codifica(codiceREF) / Codification(REFcode)	50.120 MB	MaBim®
	52.120 MBT	MaBim® Twins
Classificazione /Classification	Classe I / Class I Regola 1, Allegato VIII Regolamento (UE) 2017/745 <i>Rule 1, Annex VIII Regulation (EU) 2017/745</i>	
CND Classificazione / Classification	Z12080499	
Nr. Repertorio / No. Repertoire	1383651/R (MaBim®) 1837719/R (MaBim® Twins)	

Qualunque modifica apportata al Dispositivo Medico, se non autorizzata da Leura Srl, annulla la validità della presente dichiarazione.

Any modification applied to the medical device, if not expressly authorized by Leura Srl, cancel the validity of this declaration.

Si dichiara che i dispositivi in oggetto ottemperano alle seguenti norme tecniche:

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, are conform to the following technical standards:

- UNI CEI EN ISO 14971: 2012
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017
- UNI EN 1041:2008 + A1-2013
- UNI EN ISO 10993-1:2018

Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in confezione non sterile.

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, is commercialized in non-sterile package.

Si dichiara che la scrivente terrà a disposizione dell'Autorità Competente la documentazione di cui all'Allegato I, II e III del Regolamento (UE) 2017/745 per un periodo di 10 anni a partire dall'ultima data di produzione dei dispositivi in oggetto.

It's here declared that the subscribing company will keep all the documents mentioned in Annex I, II and III of Regulation (EU) 2017/745 available for Competent Authority for a period of 10 years from the last production of the device to which this declaration is addressed to.

Piacenza (PC), 27.05.2020

LEURA S.r.l.
Sede Leg.: Via Cavour, 43
29121 - PIACENZA
Sede Operat.: Via Vitali, 3 - 29121 PIACENZA
C.F. e P.IVA 02958860989

Legale Rappresentante
Legal Representative

Arch. Mitzi Bollani
Leura Srl

Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Montaggio, Uso e Manutenzione

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

GARANZIA DI QUALITÀ

La culla MaBim di Leura srl è fabbricata secondo le norme europee EN 60601 (CEI 62.5). Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti dovuti ad un uso non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a modifiche fatte al prodotto. Il naturale consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo sfregamento o all'uso improprio di detergenti non sono un difetto di fabbricazione.

IMPORTANTE: PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LA SEQUENZA DI MONTAGGIO PER EVITARE INUTILI PERICOLI AL BAMBINO.

ATTENZIONE: MAI LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO NELLA CULLA QUANDO ESSA HA IL FIANCO ROTANTE APERTO E NON MOVIMENTARE IL LETTO DELLA MAMMA CON LA CULLA AFFIANCATA AD ESSO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – La culla viene inviata imballata, capovolta sulla sua base con un sacchetto contenente le viti, un sacchetto contenente la cinghia e, all'occorrenza, un sacchetto contenente il materassino. Sfilare la culla dall'imballo, sollevarla e capovolgere la culla appoggiandola sulla piastra della base verificando che il fianco apribile sia sul lato opposto alla leva di regolazione dell'altezza. Prendere le quattro viti nel sacchetto e avvitarle con una brugola. Nel caso, inserire il materassino nella culla.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le movimentazioni possibili sono le seguenti: spostamento e blocco della culla; variazione altezza culla; affiancamento al letto ospedaliero.

Per spostare la culla in orizzontale, afferrare con le mani la maniglia ricavata nel lato corto della culla e spingere delicatamente nella direzione desiderata. Prima di spostare la culla verificare sempre che il lato apribile sia chiuso ed i freni sbloccati. Una volta raggiunta la posizione voluta bloccare con la punta del piede i freni delle ruote, spingendo le levette dei freni verso il basso. Per sbloccare i freni delle ruote, spostare con la punta del piede le levette verso l'alto.

A culla vuota, con una mano alzare la leva di comando e con l'altra premere nel centro della culla verso il basso, poi, completata la discesa, rilasciare la leva. Il gas in questo modo è stato compresso all'interno della colonna. Per alzare la culla sollevare la leva di comando: la culla si alzerà lentamente. Raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva. La culla deve essere allineata alla parte superiore del letto. Inserire i freni delle ruote, fissare la cinghia e aprire l'antina mobile.

Avvicinare la culla al letto della mamma verificando che il fianco apribile sia verso il letto. Regolare la giusta altezza. La culla deve essere bene aderente al letto. Inserire tutti i freni delle ruote. Se il letto è fisso o ha la possibilità di escludere le sue movimentazioni, la culla può anche sormontare il letto della mamma. Bloccare con la punta del piede le levette dei freni delle ruote spingendole verso il basso. Fissare la cinghia al letto.


SICUREZZA La culla ha in dotazione ruote complete di freni che garantiscono la sua totale stabilità. Inoltre è accessoriata con una cinghia che ne consente l'ancoraggio al letto per maggiore sicurezza: la cinghia deve essere fissata alla colonna della culla e alla struttura fissa del letto. La culla deve trovarsi perfettamente aderente al letto o sormontarlo, senza interstizi pericolosi, con la cinghia ben tesa. Ricordare di chiudere il fianco apribile prima di spostare la culla.

MOVIMENTAZIONE DEL FIANCO APRIBILE La movimentazione del fianco rotante della culla deve sempre avvenire in sicurezza. Prima di aprirlo, verificare di aver fissato i freni delle ruote. Dopo avere fissato la culla al letto, disporsi dietro la culla e ruotare l'antina prendendo in mano l'apposita fessura posizionata al centro con un movimento continuo sollevandola verso se stessi fino a portarla in appoggio sull'altro fianco. Prima di richiuderla, assicurarsi che il bambino sia lontano dalla zona di manovra. Il piccolo sforzo che richiedono tali manovre è necessario ai fini della sicurezza.

MANUTENZIONE - Occorre effettuare una manutenzione ordinaria: verificare periodicamente il corretto funzionamento di tutte le parti meccaniche ed il corretto serraggio delle viti. Assicurarsi che l'antina mobile presenti sempre lo stesso sforzo in apertura ed in chiusura: la frizione per la rotazione dell'antina mobile deve sempre funzionare allo stesso modo o essere nuovamente registrata.

CONSERVAZIONE - Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno. Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato: culla neonatale per co-sleeping. Non utilizzare la culla per trasportare oggetti.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare la culla con il fianco aperto quando vi è dentro il bambino. Non sedersi, salire o saltare sulla culla. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte. Non inserire mani o piedi nelle aperture presenti nei lati corti della culla se si sta aprendo o chiudendo la sponda mobile. In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti chimici o altre sostanze pulire immediatamente con un panno umido e sapone neutro, non usare solventi chimici. Per la pulizia non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati. Per il montaggio non utilizzare componenti diversi da quelli presenti nel kit fornito con la culla.

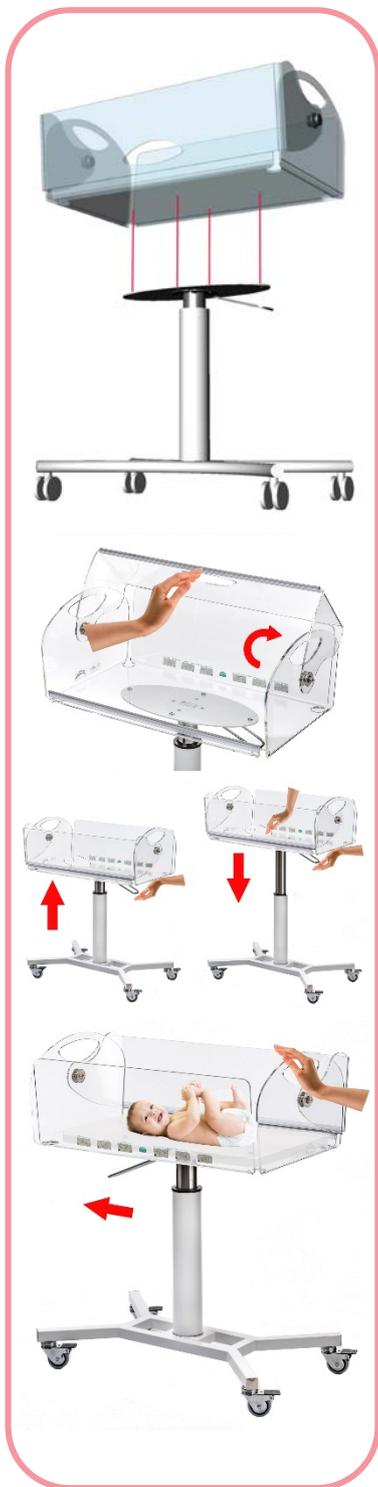

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube



Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Accostamento al Letto

BLOCCAGGIO DELLA CULLA AL LETTO

Posizionamento della culla MaBim accanto al letto della mamma: avvicinare la culla al letto della mamma fino a sormontarne il materasso il più possibile. Il lato rotante apribile deve essere rivolto verso il letto; tenendo sollevata con una mano la leva di comando della variazione in altezza, premere verso il basso al centro della culla con l'altra mano, per definire la corretta altezza. Rilasciare quindi la leva di comando. Fare questa operazione a culla vuota. Bloccare i freni delle ruote; aprire il fianco rotante fino a farlo appoggiare sul lato opposto della culla per consentire il contatto diretto tra mamma e bambino. Posizionare la cinghia di sicurezza come illustrato.



Se si preferisce, si può tenere la culla complanare al letto della mamma, bloccando i freni e collegando la cinghia di sicurezza come segue.

USO della CINGHIA DI SICUREZZA

Leura srl consiglia sempre l'uso della cinghia in dotazione perché pratica ed intuitiva. La cinghia è obbligatoria in caso di letti che si possono movimentare. Passare la cinghia con un doppio giro attorno alla struttura portante del letto o alla sua sponda, in tal modo non scivolerà a terra quando si sgancia dalla culla. Regolarne la lunghezza in modo che sia ben tesa, senza vuoti pericolosi tra la culla ed il letto della mamma e agganciarla attorno alla colonna della culla con il click-clack.

POSIZIONAMENTO CULLA ED ERGONOMIA

MaBim è stata pensata per agevolare l'ergonomia e facilitare il contatto tra mamma e bambino. Se la mamma desidera dormire viso a viso con il suo bambino, la culla viene posizionata accanto al viso della mamma come nella foto in basso a sinistra: in questo caso il letto della mamma **deve restare orizzontale**, disattivare eventualmente la funzione di movimentazione del letto. Se la mamma desidera restare in posizione seduta e quindi movimentare il letto, la culla deve essere posizionata come nella foto in basso a destra, alla fine della parte mobile del letto (linea tratteggiata), per evitare pericolosi vuoti tra culla e letto.



TEST DI SICUREZZA

Leura srl ha eseguito test in ambito ospedaliero per verificare cosa succede se la madre o una seconda persona inavvertitamente movimentano il letto quando la culla è fissata ad esso. La cinghia di sicurezza, funziona perfettamente – si vedano le foto n. 6 – 7. Le ruote si alzano, la culla si inclina: la cinghia e la sponda di sicurezza del letto fermano la sua rotazione verso l'esterno. Il bambino potrebbe scivolare sul lato esterno, ma senza il rischio di cadere a terra, perché viene trattenuto dal fianco della culla e ulteriormente protetto dal fianco rotante in appoggio ad esso.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Culle Neonatali per il Co-sleeping Sicuro

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT

Montaggio Ripiano Portaoggetti e Uso dei Materassini Termo-Riscaldati


MONTAGGIO RIPIANO PORTAOGGETTI

Nell'imballo trovate n.2 tondini in ferro verniciati bianchi, n.1 ripiano in metacrilato trasparente e n.2 viti lunghe.

Per il montaggio del ripiano porta-oggetti seguire le seguenti istruzioni:

- 1) appoggiare il ripiano su una superficie piana con il bordo rivolto verso l'alto ed avvitare ad esso i tondini utilizzando le due viti lunghe;
- 2) verificare che la culla sia posata correttamente sulla base con fianco apribile opposto alla leva di comando;
- 3) fissare la culla con due delle quattro viti più corte ;
- 4) avvicinare i tondini ed il ripiano, precedentemente montati, fissarli alla culla avvitando le viti corte nei fori indicati A e B.

Se la culla fosse già montata preparare il ripiano come sopra descritto. Svitare i dadi autofilettanti A, opposto alla leva di comando e B, sul lato opposto al fianco rotante come indicato nella foto. Posizionare i tondini e riavvitare le viti.

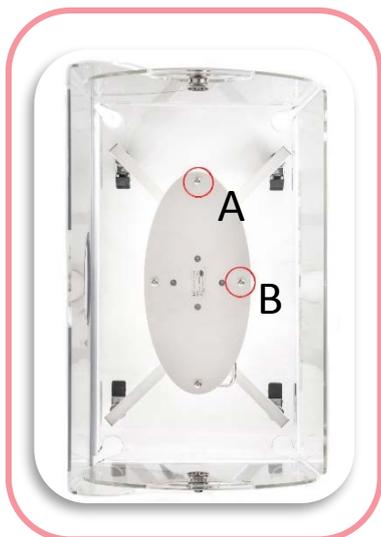

USO DEI MATERASSINI RISCALDATI E FOTOTERAPICI

Le culle MaBim sono state studiate in modo da facilitare l'uso di materassini termo-riscaldati e per la fototerapia. La macchina per il loro funzionamento viene posta sul ripiano porta-oggetti, il cavo che la collega al materassino passa attraverso i fori funzionali realizzati nella parte inferiore della culla.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





BimMa
by Leura

Lettino per Terapia Intensiva e Sub-intensiva Pediatrica

Dispositivi Medici CE

Descrizione Generale

BimMa (Bim= Bimbo e Ma = Mamma) è un lettino pediatrico specificatamente studiato per i reparti di terapia Intensiva e sub-intensiva neonatale. Il lettino, grazie alle quattro spondine completamente trasparenti e sfilabili, permette ai medici di monitorare costantemente il bambino e di intervenire facilmente su di lui in caso di urgenze e manovre. Tutte le sponde hanno forature per facilitare il passaggio di eventuali cavi e cateteri. Le due sponde laterali possono essere posizionate ad altezze diverse.

Il piano posto sotto il materassino può essere facilmente movimentato manualmente per collocare il neonato in posizione Trendelenburg o Contro-Trendelenburg. Un pratico ripiano porta-oggetti, posto alla base della culla, permette il posizionamento di macchinari utili alle terapie. BimMa è dotato di quattro ruote tutte con freno ed è accessoriatato con materassino antifiamma. Su richiesta, il lettino può essere completato con braccio snodato portaflebo.

Funzionale, facile da pulire, dalle linee semplici e lineari, BimMa è particolarmente utile nei reparti di pediatria e terapia intensiva o sub-intensiva neonatale.



- + Tutte le sponde sono sfilabili
- + Sponde laterali posizionabili a diverse altezze
- + Piano Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- + Piano portaoggetti e macchinari
- + Ruote con freno a bloccaggio totale
- + Possibilità di completare con braccio portaflebo

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





BimMa

Designer Arch. Mitzi Bollani



Dispositivi Medici CE: art. 50.150BM – 50.151BM

Dati Tecnici

I lettini BimMa sono composti da:

- una struttura in ferro verniciata in colori RAL dotata di ripiano portaoggetti e ruote con freno a bloccaggio totale;
- quattro sponde in PMMA trasparente sfilabili e le lunghe posizionabili a diverse altezze;
- spine di bloccaggio di sicurezza per la posizione – catetere renale;
- un ripiano in alluminio per movimentazione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.

BimMa 50.150BM:

Peso Totale: 43,50kg

Dim. Totali: (LxWxH) 81x55x130m

Dim. Piano Lettino: (LxW) 72x45cm

BimMa XL 50.151BM:

Peso Totale: 48,50 kg

Dim. Totali: (LxWxH) 100x60x130 cm

Dim. Piano Lettino: (LxW) 94x54 cm

Categoria: metacrilati, alluminio, ferro

Colori: sponde trasparenti e struttura in colori RAL

Classe di Resistenza al Fuoco: classe E conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Accessori:

- **50.150 MT Maby BimMa:** materassino antifiama in PU espanso flessibile con rivestimento in tessuto impermeabile e traspirante ignifugo di dimensioni (LxWxH) 72x45x6 cm
- **50.151 MT Maby BimMa XL:** materassino antifiama in PU espanso flessibile con rivestimento in tessuto impermeabile e traspirante ignifugo(LxWxH) 93,5x53,5x6 cm
- **50.BRSN** braccio a due snodi porta-flebo.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Dichiarazione di Conformità EC Conformity Declaration

Leura Srl in qualità di Fabbrikante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione richiesti dall'allegato I del Regolamento (UE) 2017/745 e successive modifiche integrative.

Leura Srl as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the General Requirements for Safety and Performance required by annex I of Regulation (EU) 2017/745.

Fabbricante / Manufacturer	LEURA Srl - Via Cavour, 43 29121 Piacenza (PC) - ITALIA
Nome del dispositivo / Device name	"BimMa®"
Codifica (codice REF) / Codification (REF code)	50.150BM
Classificazione / Classification	Classe I / Class I Regola 1, Allegato VIII Regolamento (UE) 2017/745 Rule 1, Annex VIII Regulation (EU) 2017/745
CND Classificazione / Classification	Z12080499
Nr. Repertorio / No. Repertoire	1860608/R

Qualunque modifica apportata al Dispositivo Medico, se non autorizzata da Leura Srl, annulla la validità della presente dichiarazione.

Any modification applied to the medical device, if not expressly authorized by Leura Srl, cancel the validity of this declaration.

Si dichiara che i dispositivi in oggetto ottemperano alle seguenti norme tecniche:

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, are conform to the following technical standards:

- UNI CEI EN ISO 14971: 2012
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017
- UNI EN 1041:2008 + A1-2013
- UNI EN ISO 10993-1:2018

Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in confezione non sterile.

It's here declared that the device to which this declaration is addressed to, is commercialized in non-sterile package.

Si dichiara che la scrivente terrà a disposizione dell'Autorità Competente la documentazione di cui all'Allegato I, II e III del Regolamento (UE) 2017/745 per un periodo di 10 anni a partire dall'ultima data di produzione dei dispositivi in oggetto.

It's here declared that the subscribing company will keep all the documents mentioned in Annex I, II and III of Regulation (EU) 2017/745 available for Competent Authority for a period of 10 years from the last production of the device to which this declaration is addressed to.

Piacenza (PC), 27.05.2020

LEURA S.r.l.
Sede Leg.: Via Cavour, 43
29121 - PIACENZA
Sede Operat.: via Vitali, 3 - 29121 PIACENZA
C.F. e P.IVA 02958860989

Legale Rappresentante
Legal Representative

Arch. Mitzi Bollani
Leura Srl

Lettini Pediatrici per Terapia Sub-intensiva Neonatale

Art. 50.150BM - Art. 50.151BM

Montaggio, Uso e Manutenzione

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE



GARANZIA DI QUALITA'

La culla BimMa di Leura srl è fabbricata secondo le norme europee EN 60601 (CEI 62.5). Questo prodotto è garantito per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Non possono essere reclamati difetti o deterioramenti dovuti ad un uso non adeguato, al non rispetto delle norme di sicurezza, di montaggio e d'uso descritte o a modifiche fatte al prodotto. Il naturale consumo ed i danni causati da uso improprio o scorretto non sono contestabili. Graffi, usura, opacizzazione dovuti allo sfregamento o all'uso improprio di detergenti non sono un difetto di fabbricazione.

IMPORTANTE: PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ATTENZIONE: NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO NELLA CULLA CON LE SPONDE ABBASSATE.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Il lettino viene fornito montato. Sarà sufficiente inserire le sponde trasparenti nelle rispettive guide in polietilene e il piano Trendelenburg nel relativo spazio.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Il lettino pediatrico BimMa è stato disegnato per accogliere e poter intervenire prontamente sui bimbi con patologie: BimMa agevola l'accesso al piccolo paziente da parte del personale medico, facilita il collegamento a macchinari per le terapie, permette la posizione Trendelenburg e Contro-Trendelenburg e il costante monitoraggio visivo del bambino grazie alle sponde totalmente trasparenti.

Per spostare il lettino è necessario sbloccare i freni delle ruote. Se il bambino è all'interno, prima di questa operazione, verificare che tutte le sponde siano inserite correttamente e le spine di bloccaggio attivate. Direzione e spingere la culla. Raggiunta la posizione desiderata bloccare nuovamente i freni.

Inserire o togliere le sponde corte dalla guida di polietilene tenendole dall'apposita apertura. Inserire o togliere le sponde lunghe prendendole con entrambe le mani. Queste sponde possono essere posizionate a diverse altezze. La guida di scorrimento è esterna: spingendo dolcemente verso l'interno le alette di queste sponde, si troverà la sede desiderata. Per cambiare la posizione, alzarle di poco, portarle nella guida esterna e ripetere il movimento ricercando la nuova sede.


LA SPONDA CORRETTAMENTE POSIZIONATA E' SICURA E NON ESCE DALLA SUA SEDE. Sono state previste due spine di bloccaggio, attivabili abbassandone la leva, per garantire una maggiore sicurezza, nella posizione utilizzata in caso di catetere renale. Prima di cambiare posizione alle sponde accertarsi di aver rimosso il blocco delle spine.

Per la posizione Trendelenburg e Contro-T sollevare manualmente il ripiano sotto-culla ed inserirlo nelle apposite aperture del polietilene.

MANUTENZIONE – Tutta la struttura è saldata. Verificare periodicamente il funzionamento delle ruote.

CONSERVAZIONE - Non esporre il dispositivo a temperature, umidità e fonti di rischio, non posizionare in esterno. Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi chiusi e per lo scopo per cui è stato realizzato.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare il lettino con il sponda abbassata quando vi è dentro il bambino. Non sedersi, salire o saltare sul lettino. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte.

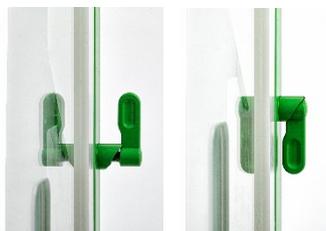

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube





Toast R
by Leura



Toast R

Sedia per Marsupio Terapia

Descrizione Generale

Toast R è una seduta ideale per la marsupio terapia da effettuarsi nelle TIN (Terapia Intensiva Neonatale). Ha tutte le caratteristiche utili per offrire comfort all'utente e contestualmente rispondere alle esigenze ospedaliere: confortevole, funzionale, antiribaltamento, può essere reclinata in diverse posizioni fino alla posizione Zero Gravity per il massimo comfort. Nella posizione diritta a 90° il poggiatesta si richiude perfettamente garantendo alla persona che utilizza Toast R di potersi sedere e alzare agevolmente, con in braccio un neonato, senza rischi di inciampo. La posizione Zero Gravity facilita lo scarico completo della schiena e migliora la circolazione negli arti inferiori. Quando Toast R non viene utilizzata, viene richiusa occupando pochissimo spazio.

Toast R è molto apprezzata nei reparti TIN perché ideale per la Kangaroo Mother Care o Marsupio Terapia che consiste nel contatto diretto pelle a pelle tra neonato e genitore per un periodo di tempo di 90-120 minuti. Quando le condizioni cliniche del neonato sono stabili, il piccolo viene posizionato sul torace del genitore in posizione frontale, con la testa girata di lato in modo da impedire l'ostruzione delle vie respiratorie. La Marsupio Terapia consente al neonato un contatto rassicurante pelle a pelle con la mamma o il papà, provando nuovamente sensazioni, odori, suoni e rumori sperimentati nell'ambiente intrauterino, facilitando un suo più rapido adattamento alla vita extrauterina. Poiché questa pratica necessita di un periodo piuttosto lungo è assolutamente importante avere una seduta che consenta una postura corretta, rilassi tutti i muscoli e permetta di tenere il bambino nella giusta posizione.

Toast R è dotata di un poggiatesta regolabile che può essere rimosso in caso di necessità.



- + Antiribaltamento
- + Ignifuga
- + Poggiatesta perfettamente richiudibile
- + Poggiatesta regolabile
- + Reclinabile fino alla posizione Zero Gravity



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Toast R

Designer Arch. Mitzi Bollani

Sedia Pieghevole, Reclinabile e Ignifuga

Per Marsupio Terapia

Dati Tecnici e Istruzioni

Toast R cod. 3410-R è dotata di un poggiatesta regolabile che può essere rimosso in caso di necessità. Essendo una sedia pieghevole può essere facilmente riposta quando non viene utilizzata. Toast R è realizzata in lega di acciaio verniciato a polveri termoindurenti e tessuto Texfil microforato ignifugo.

Categoria: polivenile e poliестere (tessuto), ferro (struttura)


Colori: tortora (struttura e braccioli), bianco (tessuto)

Classe Resistenza al Fuoco: classe 1

Carico di Lavoro Sicuro: 100kg

Peso: 8,5kg

Dimensioni: (LxWxH) aperta 66x67x120cm - chiusa 66x13x98cm

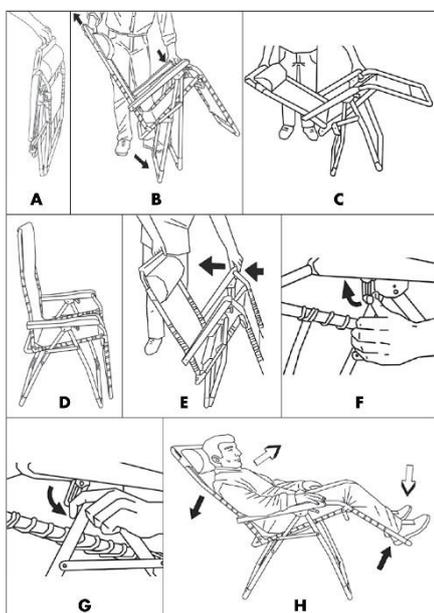

ISTRUZIONI D'USO: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Seduta multiposizioni pieghevole con dispositivo di regolazione dell'inclinazione tramite aste telescopiche con possibilità di bloccaggio nella posizione desiderata. Posizionate la poltrona su una superficie piana stabile, tenendo le gambe appoggiate a terra e lo schienale rivolto verso l'alto (figura A); procedere all'apertura tenendo il punto più alto dello schienale con una mano e l'estremità del bracciolo con l'altra mano. Tirare lo schienale verso l'alto premendo il bracciolo verso il basso (figura B) sino alla completa apertura delle gambe (figura C). Prima di sedersi portare lo schienale in posizione verticale (figura D). Per poter utilizzare l'articolo in massima sicurezza accertatevi che le gambe siano completamente aperte. La ditta LEURA declina ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti a negligenza o all'inosservanza delle indicazioni riportate sul presente foglio d'istruzione. Chiusura: mantenendo lo schienale in posizione verticale (figura D), prendere con una mano l'estremità di un bracciolo tirandolo all'indietro verso lo schienale (figura E) sino a chiusura completa. Per fissare ogni posizione, tirare le levette di frizione (fig. G). Per variare posizione è necessario esercitare una leggera pressione dei piedi sulla parte terminale del telaio (fig. H). Per ritornare alla posizione seduta, portare il peso del corpo in avanti e far pressione con i piedi sul telaio. È importante verificare che il dispositivo di sicurezza sotto il bracciolo non sia bloccato durante la regolazione della posizione (fig. F.3) - L'articolo è progettato e realizzato per un uso "normalmente prevedibile", che implica: il rispetto per il carico per il quale è stato ideato, vale a dire 100 kg al massimo. Si esclude quindi l'uso simultaneo da parte di due persone, anche se in appoggio momentaneo o parziale su qualsiasi parte della sedia. Sedersi dolcemente sulla poltrona senza lasciarsi cadere dall'alto. Effettuare il cambio di inclinazione lentamente senza precipitare. L'utilizzo da parte dei bambini va sorvegliato da adulti. Controllare la tenuta degli elastici (in caso di usura procedere alla sostituzione). Conservare al riparo dalle intemperie e riportarlo nel periodo di non utilizzo in luogo asciutto. **GARANZIA** Questo prodotto LEURA è garantito per un anno. Questa garanzia non riguarda l'uso improprio del prodotto. Per garantire maggior longevità e la manutenzione del prodotto LEURA mette a vostra disposizione i seguenti pezzi di ricambio: - Kit elastici - Set coppia braccioli / angolari - Tela seduta (nei colori disponibili). **ALTRI PRODOTTI:** LEURA propone un'ampia scelta di prodotti mother-baby-friendly. La gamma completa è visionabile all'indirizzo internet.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





NiDondolo
by Leura



NiDondolo

Designer Arch. Mitzi Bollani



Giostra Inclusiva per Tutti 4+

Giostra, Dondolo, Altalena ALL IN ONE

Descrizione Generale

NiDondolo si presenta come una grande ciotola (NIDO) che al minimo spostamento della persona inizia un movimento rotatorio, basculante e oscillatorio (DONDOLO). I bambini possono giocare a carponi, coricati, seduti o in piedi secondo le loro abilità, senza pericolo. Nato per dare risposta a bambini con limitazioni motorie, sensoriali e cognitive, è un gioco divertente e stimolante per tutti, adulti compresi, grazie alla sua robustezza. NiDondolo riesce a creare un'integrazione spontanea senza dare luogo a situazioni di emarginazione o discriminazione. Questo gioco attivo sviluppa la propriocezione ovvero la particolare sensibilità grazie alla quale l'organismo ha la percezione di sé in rapporto al mondo esterno.

NiDondolo è un gioco in cui il bambino partecipa attivamente in ogni momento perché il suo movimento libero crea stimoli muscolari e neurologici attivando le capacità di controllo ed equilibrio. NiDondolo è sinonimo di velocità e allo stesso tempo di sicurezza. Questa giostra consente a tanti bambini di giocare insieme contemporaneamente in spazi relativamente ridotti. Posizionabile sia all'interno che all'esterno, NiDondolo non necessita di essere vincolato a terra per garantire la stabilità, purché sia posizionato su una superficie perfettamente piana. Di facile manutenzione, questa giostra è ideale per parchi, scuole, asili, centri commerciali, aeroporti, ospedali, palestre...

NiDondolo è nato nel 2004 su richiesta di ASBI Associazione Spina Bifida Italia che desiderava un gioco a misura di bambini affetti da Spina Bifida che permettesse l'integrazione e il gioco di gruppo con i loro coetanei. NiDondolo è stato riconosciuto come esempio di buona prassi Design for All su ECA European Concept for Accessibility e Zero Project.



- + Movimento libero
- + Velocità
- + Sicuro anche senza fissaggio al suolo
- + Gioco di gruppo e integrazione
- + Gioco attivo che sviluppa propriocezione

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube





NiDondino

Designer Arch. Mitzi Bollani



Giostra Inclusiva per Tutti 0+

Giostra, Dondolo e Strumento di Riabilitazione Neuro-motoria ALL IN ONE

Descrizione Generale

NiDondolino è un gioco adatto ai più piccini alto solo 24 cm da terra. NiDondolino è un gioco attivo che sviluppa la proprioccezione ovvero la praticolare sensibilità grazie alla quale l'organismo percepisce sé stesso in rapporto al mondo esterno: il suo movimento libero crea stimoli muscolari e neurologici attivando le capacità di controllo ed equilibrio.

NiDondolino è uno strumento efficace di lavoro per i fisioterapisti per due motivi: con un solo strumento possono essere svolti diversi esercizi che sviluppano le capacità neuro-funzionali dell'utilizzatore, permettendo il recupero delle capacità psico-fisiche dei pazienti senza essere costretti a cambiare attrezzo; i piccoli pazienti lavorano in modo molto più collaborativo quando le terapie sono svolte in modo ludico come con NiDondolino.

Posizionabile sia all'interno che all'esterno, NiDondolino non necessita di essere vincolato a terra per garantire la stabilità, purché sia posizionato su una superficie perfettamente piana. Di facile manutenzione, questo gioco è utilizzato nelle unità di Neuropsichiatria Pediatrica ma è ideale anche per parchi, scuole, asili, centri commerciali, aeroporti, palestre...



- + Movimento libero
- + Velocità
- + Sicuro anche senza fissaggio al suolo
- + Gioco di gruppo e integrazione
- + Gioco attivo che sviluppa proprioccezione

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

facebook

LinkedIn

YouTube





Giostre Inclusive per Tutti

Art. 20.120 – Art. 20.110

Dati Tecnici

NiDondolo 20.120 ha il movimento libero poiché scorre su cuscinetti a sfera.

NiDondolo va posizionato su un terreno perfettamente in piano, inerbato o ricoperto con materiale antishock, libero da ostacoli naturali o artificiali (UNI EN 1176-1). La struttura è predisposta per il bloccaggio a terra, anche se non è strettamente necessario per la sicurezza poiché non si ribalta.

Categoria: AISI 304 e poliestere

Classe di Resistenza al Fuoco: rivestimento autoestinguente classe 2


Classe di Lavoro Sicuro: 400kg

Dimensioni Totali: (LxWxH) 190x190x47cm

Oscillazione Laterale: +/- 45cm

Area Libera di Gioco: 400x400cm

Età: 4+

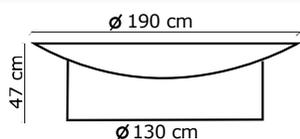

NiDondolino 20.110 è un gioco adatto anche a bimbi molto piccoli ed uno strumento di riabilitazione neuromotoria. NiDondolino va posizionato su un terreno perfettamente in piano, inerbato o ricoperto con materiale antishock, libero da ostacoli naturali o artificiali (UNI EN 1176-1).

Ha una oscillazione limitata ed è antiribaltamento.

Categoria: AISI 304 e poliestere

Classe di Resistenza al Fuoco: rivestimento autoestinguente classe 2


Classe di Lavoro Sicuro: 180kg

Dimensioni Totali: (LxWxH) 80x80x24cm

Oscillazione Laterale: +/- 16cm

Area Libera di Gioco: 240x240cm

Età: 0+

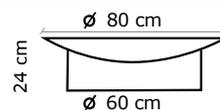

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



RAPPORTO DI PROVA: 16.27872

Questo rapporto è costituito da 10 pagine, di cui:

02 pagine per il Sommario

08 pagine per il Rapporto di Prova 16.27872a

Data Ricevimento campione: 13/6/2016

Data Emissione rapporto: 14/6/2016

FABBRICANTE Q10029

LEURA SRL

RICHIEDENTE Q10029

LEURA SRL

Via Cavour, 43

29121 Piacenza -PC-

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (no. 301065)

NIDONDOLO



Nota: è vietata la riproduzione, anche in forma parziale del presente rapporto, qualsivoglia modifica od alterazione dello stesso.
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il campionamento è stato effettuato a cura del cliente



RAPPORTO DI PROVA: 16.27872

del 14/6/2016

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (no. 301065)

NIDONDOLO

TEST RICHIESTI

EN 1176-1:2008 Attrezzature per aree da gioco. Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova §Parziale escluso par.4.1	CONFORME §
EN 1176-5:2008 Requisiti aggiuntivi di sicurezza e metodi di prova per le giostre	CONFORME

*Nota: è vietata la riproduzione, anche in forma parziale del presente rapporto, qualsivoglia modifica od alterazione dello stesso.
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni testati. Le conclusioni sono espresse con esclusivo riferimento alle parti dettagliate in ciascun Rapporto di Prova e sulla base dei limiti ivi specificati. Il campionamento è stato effettuato a cura del cliente.*

Responsabile Laboratorio Fisico-Meccanico



NiDondolo

Designer Arch. Mitzi Bollani



Giostre Inclusive per Tutti

Art. 20.120 – Art. 20.110

Montaggio, Uso e Manutenzione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Nidondolo viene spedito assemblato. Il gioco deve essere posato perfettamente in piano. Non è necessario il suo ancoraggio a terra. In ogni caso se si vuole ancorarlo al terreno per evitare che venga spostato si seguano le seguenti indicazioni: all'esterno di Nidondolo sono visibili le piastre per l'ancoraggio. Eseguire una platea di fondazione di diametro 1500 mm e ancorare Nidondolo utilizzando tasselli per cemento. Provvedere infine a proteggere gli ancoraggi con materiale antishock attorno come da normativa (UNI EN 1176-1) che sarà utile anche per mantenere pulito lo spazio attorno al gioco.

Come definito nella normativa UNI EN 1176-1, lo spazio libero di un'attrezzatura è quello che può essere occupato da un utilizzatore nel momento di interazione con il gioco e può quindi anche essere considerato come l'area circostante la struttura, necessaria per il suo corretto utilizzo e per la completa mobilità dell'utilizzatore. Per evitare ad un uso improprio del gioco, quindi da in piedi e non da posizione distesa il gioco è stato inserito nella categoria dei dischi giganti quindi l'area priva di ostacoli deve essere di 3 metri, circostante il gioco. Come definito dalla norma UNI EN 1176-5 lo spazio libero per la testa al di sopra dell'altezza massima della giostra deve essere di almeno 2 metri. Questi spazi devono essere presi in considerazione soprattutto nel caso in cui ci siano ostacoli fissi attorno al gioco.

Come definito nella normativa UNI EN 1176-1, anche se la distanza verticale tra il supporto dell'attrezzatura appositamente destinato al corpo e la superficie d'impatto sottostante è inferiore a 1000 mm, è necessario utilizzare, un materiale di assorbimento d'impatto, con caratteristiche di "altezza critica" di almeno 1000 mm in accordo alla UNI EN 1177. Si consiglia nel caso di installazione esterna in un prato, di adagiare in prossimità del gioco una superficie di materiale antiurto che rende più pulita l'area di esercizio del gioco.

ISTRUZIONI DI PULIZIA - Pulire solo con un panno morbido umido e sapone neutro. NON usare solventi o altri prodotti non specificatamente indicati. NON usare materiali abrasivi.


ISTRUZIONI DI UTILIZZO - Le persone possono giocare su NiDondolo a carponi, coricati, seduti o in piedi secondo le loro abilità, senza pericolo. Al minimo movimento del corpo, la giostra attiva un movimento rotatorio, basculante e oscillatorio.

MANUTENZIONE - Occorre verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'attrezzo e il fissaggio delle parti. In caso di rotazione non fluida si consiglia in primis la pulizia dei cuscinetti inox e se questo non bastasse la loro sostituzione. Nel caso di eccessiva lentezza nello scarico dell'acqua, ripulire i fori posti al centro della calotta. Ripulire la superficie della calotta se accidentalmente è presente del materiale estraneo introdotto durante l'utilizzo.

CONSERVAZIONE - Il prodotto è destinato all'utilizzo e per lo scopo per cui è stato realizzato: giostra inclusiva. Non esporre il dispositivo a temperature e fonti di rischio.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO - Non spostare il gioco con persone od oggetti sopra. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato in qualsiasi sua parte.

SMALTIMENTO - Per lo smaltimento separare i diversi materiali e quindi consegnarli presso un punto di smaltimento.

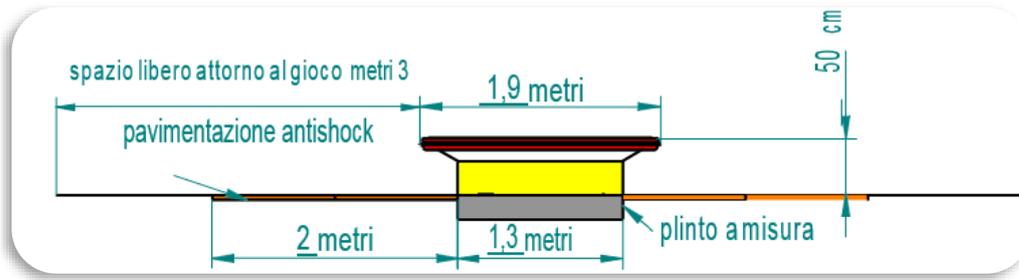

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it






NiDondolo

Designer Arch. Mitzi Bollani

Giostre Inclusive per Tutti

Art. 20.120 – Art. 20.110

Galleria Immagini

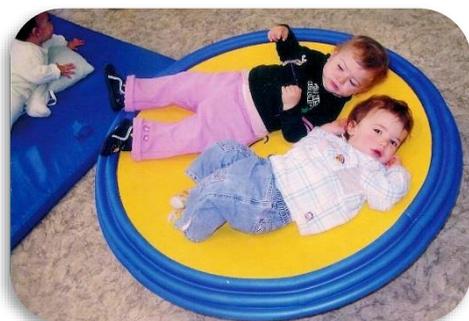

Alcune foto delle giostre NiDondolo inviate da alcuni nostri Clienti.



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592


INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



2013

ECA

European Concept for Accessibility

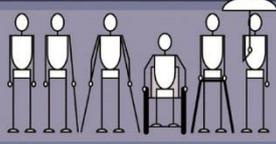

Design for All in progress,
dalla teoria alla pratica
ECA 2013

6.10 NIDONDOLO – Gioco e Strumento Riabilitativo – TUTTO in uno

Progettato da Mitzi Bollani – prodotto da LEURA srl

Nidondolo è un gioco di movimento accogliente, adatto sia ai bambini di tutte le età che agli adulti. È un esempio concreto di un prodotto di "Design for All", voluto dall'associazione ASBI (Associazione Spina Bifida Italia) perché i ragazzi non potevano giocare nei parchi pubblici in modo autonomo e nessuna azienda aveva giochi adatti sul mercato.

Involgimento dei soggetti interessati: Mitzi Bollani ha raccolto la sfida con l'aiuto di un piccolo gruppo di lavoro di bambini con la spina bifida, per ideare il progetto. Il gioco doveva garantire l'eccitazione e la velocità e doveva essere facilmente utilizzato dai bambini con limitazione nell'attività senza alcun aiuto da parte degli adulti.

Nidondolo infatti, appare come una grande ciotola, un nido appunto, che ruota, bascula e oscilla, modificando il suo movimento ad ogni pur minimo impulso da parte di chiunque lo stia usando. Il suo nome deriva da una combinazione di due parole italiane: Nido e Dondolo. I bambini possono entrarvi da soli, lasciarsi cadere al suo interno, strisciare a carponi e giocare sdraiati, seduti...



Foto: Nidondolo al Parco di Galleana – Piacenza – Italia e la progettista Mitzi Bollani che parla con i bambini per raccogliere i loro punti di vista (© Arch. Mitzi Bollani - Maggio 2007)



Foto: Nidondolo al Parco di Galleana – Piacenza – Italia con un ragazza con autismo, ben integrata nel gruppo di gioco. (© Arch. Mitzi Bollani - Maggio 2007)

ACCESSO PER TUTTI e non solo per bambini con limitazione nell'attività. Nidondolo è un nuovo gioco che funziona con modalità differenti e per questo motivo attira tutti i bambini, facilitando la loro integrazione e il gruppo di gioco.

Nidondolo non discrimina con il suo design: un bambino con disabilità, seduto o sdraiato su Nidondolo, appare come qualsiasi altro bambino. Nidondolo è collaudato per un carico di 500 kg e gira rapidamente e facilmente anche a pieno carico. Questo aspetto ha sorpreso e soddisfatto i bambini che, dopo aver testato il prototipo, hanno detto: **"Adesso NOI ci prendiamo cura degli altri!"**

48

UTILITÀ PER TUTTI: Nidondolo sviluppa la corretta crescita psicomotoria del bambino perché si sviluppa la "propriocezione": la capacità del nostro corpo di avere la percezione di sé in relazione al mondo esterno. È anche una sfida perché permette a 25 o più bambini nello stesso momento di giocare insieme in maniera sicura in uno spazio molto piccolo (cm. 400x400, pari alle dimensioni di una stanza).

Ci sono pochissimi giochi di movimento per bambini al di sotto di un anno e Nidondolo nelle sue piccole dimensioni di 80 cm di diametro, è uno strumento importante per la consapevolezza del proprio corpo, la coordinazione e la reattività.



Foto: Nidondolo al Parco Sasso Marconi – Bologna – Italia – Congresso Annuale del ASBI – Associazione Spina Bifida Italia, (© Arch. Mitzi Bollani - Maggio 2006)



Testato e utilizzato in neuropsichiatria infantile, Nidondolo, nella sua piccola dimensione è un utile strumento per la terapia, grazie ai suoi tre movimenti liberi di rotazione, torsione e oscillazione.

Negli ospedali, il gioco soddisfa le esigenze dei giovani pazienti, anche i più deboli, perché non richiede alcuno sforzo fisico.

Foto: Nidondolo al reparto Pediatrico dell'ospedale "Niguarda" a Milano nel 2012 e al reparto di Neuropsichiatria Infantile – dell'ospedale "Guglielmo da Saliceto" di Piacenza nel 2009. (© Arch. Mitzi Bollani)

È anche utilizzabile da adulti per il recupero funzionale degli arti inferiori e come strumento di allenamento in alcuni sport come il rugby.

Autore:
Mitzi Bollani

49



About us | Indicators | Policies | Practices | Conference | News | Downloads | Q

Nidondolo

You are here: Home / Nidondolo

Facebook Like | Twitter Tweet | +1 | LinkedIn Share

Innovative Practices 2014 on Accessibility

Access for all children

Nidondolo is a game of movement suitable for children of all ages, very exciting because it develops the proprioception ability, which is the particular sensitivity that allows the body to have the perception of itself in relation to the outside world.

PROBLEMS TARGETED

"Nidondolo does not discriminate with its design: a child with a disability, sitting or lying down in Nidondolo, looks like any other child."

It was wanted by the ASBI Association (Spina Bifida Association Italy) because their children could not play independently in public playgrounds and no company had suitable games in the market. So the architecture took up the challenge with a small working group of children with spina bifida malformation, to give rise to the project.

MITZI BOLLANI

About the practice at a glance

NAME OF INNOVATIVE PRACTICE:	Nidondolo
ORGANISATION:	LEURA srl
COUNTRY OF ORIGIN:	Italy
BENEFICIARIES TARGETED:	children who have limited mobility, sensory or mental capabilities
APPROACH/ MODEL/ SOLUTION:	a game of movement, suitable for children of all ages

PROJECT

Nidondolo is a new game that works with different modes and for that reason it attracts all children, facilitating their integration and group play. It develops the proper psycho & motor growth of the child because it develops the "proprioception": the ability of our body to have the perception of self in relation to the outside world. It is also a challenge because it allows 25 or more children to play safely and contemporary together in a very small space.

CURRENT SITUATION & OUTLOOK

Nidondolo was tested and is now used in Child Neuropsychiatry, in its small size is a useful tool for the therapy, thanks to its three and free movements of rotation, twisting and swinging. In hospitals, the game satisfies the needs of young patients, even the weakest, because it requires no physical effort.

Nidondolo

Nidondolo at Pediatric ward of "Niguarda" Hospital.

FACTS & FIGURES

- a combination of two Italian words: Nido, meaning "nest", and Dondolo, meaning "swing"
- available in two sizes



CONTACT

Mitzi BOLLANI
Via Vitali, 3 - 29121 Piacenza (I)
studio@mitzibollani.com
www.mitzibollani.com

EXPERT VOTING

Top marks from: CEE voters, EU voters, Academic voters

NiDondolo



Dal 2006 un gioco adatto a tutti i bambini entra nelle pediatrie degli ospedali e nei parchi urbani grazie ad ASBI e al contributo di sensibili Aziende sostenitrici del progetto.

Come nasce il progetto NiDondolo?

L'associazione ASBI nel 2004 ha condotto uno studio sulle attrezzature dei parchi gioco, degli asili nido e scuole materne e delle salette ricreative che sono nate nelle pediatrie degli ospedali, da questo studio rilevò che il più delle volte i giochi non sono a misura dei bimbi affetti da Spina Bifida.

"Alcuni bambini giocavano, altri restavano solo a guardare..." - racconta Maria Cristina Dieci, Presidente ASBI - " e così abbiamo scritto una proposta di progetto, incaricando l'arch. Mitzi Bollani, esperta in materia di Design for All Accessibilità, Salute e sicurezza per tutti, di renderlo esecutivo. Lo studio, durato circa un anno, è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna, in seguito l'impegno di ASBI è stato quello di realizzare un prototipo e di trovare una Azienda sensibile e capace di inserirlo nella produzione affinché tutti possano usufruirne".

ASBI con la Campagna Nazionale "un NiDondolo dove c'è un bambino" vuole comunicare che è possibile "pensare" e realizzare un mondo accessibile a tutti per facilitare e migliorare la vita e i rapporti relazionali dei soggetti più deboli. Si augura che questa iniziativa risveglierà una maggiore sensibilità e professionalità sull'argomento, eliminando gli interventi approssimativi, se non addirittura ridicoli, che il rispetto normativo ed il controllo esercitato non riescono comunque ad eliminare.



PRODOTTI INNOVATIVI MOTHER FRIENDLY

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

 facebook

 LinkedIn

 YouTube

